

PODMÍNKY UŽITÍ

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsat): Identifikačný štítok / Typ výrobku (vypísať): :
Výstupní kontrola: Výstupná kontrola:	
Jméno: Meno	
Podpis: Podpis:	

Podmínky užití:

- Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
- Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
- Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
- Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
- Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
- Při uplatnění reklamace musí uživatel nepochybně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
- Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
- Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
- Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik . Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
- Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
- Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměřovat s užitou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat

Datum prodeje (den, měsíc, rok):
 Dátum predaja (deň, mesiac, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
 Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho:

Podmienky použitia:

- Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru počas 24 mesiacov od prevzatia.
- Výrobek musí byť použitý výlučne na účely, na ktoré sa má určiť a používateľ musí riadiť pokyny uvedené v návode na použitie. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s "Návodom na použitie" výrobca neodpovedá.
- Výrobok musí byť riadne používaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- Každú vzniknutú chybu je potrebné ihneď po jej zistení opraviť. Za chyby vzniknuté následkom ďalšieho používania výrobku, bez toho, aby boli pôvodné chyby opravené, nesie plnú zodpovednosť používateľ.
- Reklamácie musí byť uplatnená u predajcu (vrátane predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol produkt zakúpený. Uplatnenie reklamácie sa riadi príslušnými odsekmi Občanského a iných zákonov ČR.
- Pri uplatnení reklamácie musí používateľ nepochybné preukázať, že u predajcu tovaru / výrobku zakúpil. Na zabezpečenie vyriešenia reklamácie sa odporúča predložiť doklad o zakúpení výrobku a vyplnený posledný zoznam návodu na použitie s výrobným číslom reklamovaného tovaru.
- Výrobca zabezpečuje výrobok identifikačným štítkom. Ak sú údaje na identifikačnom štítku nečitateľné alebo ak neexistuje úplne, môže byť používateľ vyzvaný na doloženie totožnosti reklamovaného tovaru.
- Reklamný postup môže byť zahájený, ak je reklamovaný tovar zaslaný opatrne zabalené a zaistené proti poškodeniu. Veľmi vhodné je tovar zaslaný v originálnom obale. Za poškodenie reklamovaného tovaru, ktoré vzniklo pri jeho zaslání, výrobca nezodpovedá. Majiteľ je povinný predložiť reklamované výrobky čisté a hygienicky nezávadné, podľa všeobecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri žiadosti požadovať, aby v priebehu reklamácie riadenia vykonali základnú údržbu alebo čistenie výrobku.
- Uplatnenie práva z vady sa nevztahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým používaním, najmä na znečistenie, opotrebenie, či poškodenie potahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu či defektu pneumatík. Uplatnenie práva z vady tiež stráca platnosť, ak boli závady spôsobené nedovoleným preťažovaním, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným zaobchádzaním s ním.
- Technické riešenie podvozku nezaručuje ideálne vedenie stopy, preto táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie.
- Dobu uplatnenia práva z vady nemožno zamieňovať s užitnou dobou, tj. dobou po ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby, môžu tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v konštrukcii správne používať



Návod k použití (CZ)

Návod k použitiu..... (SK)

Dětský koupací systém OTTER (S,M,L)



Distributor v ČR:


PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419
 CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 fax.: +420-315 630 199
 reha.cz@patron.eu
 www.patron.eu

Výrobce:

Drive Medical GmbH & Co. KG
 Leutkircher StraÙe 44
 88316 Isny/Allgäu



SCHÉMA

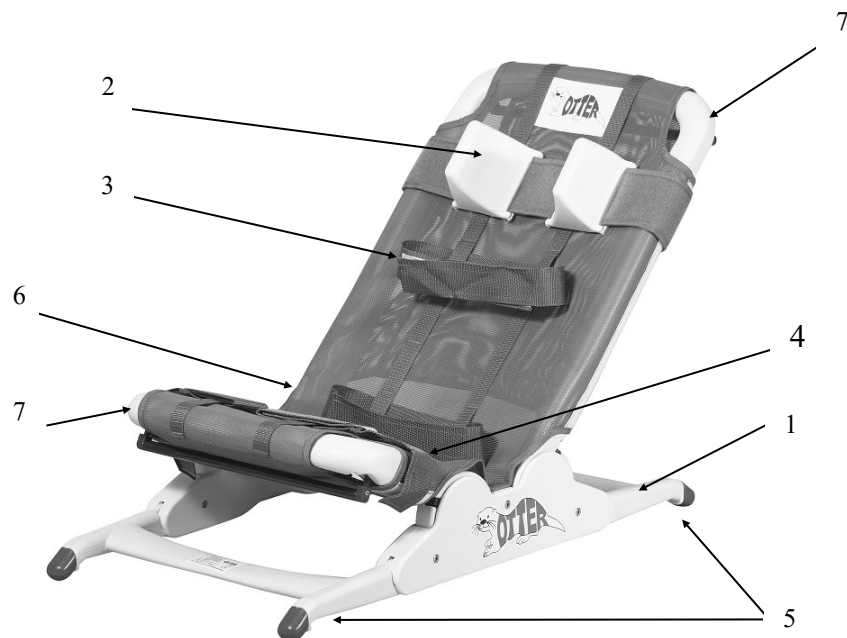

ZÁKLADNÍ PARAMETRY	S	M	L
Šířka sedáku / Šírka sedadla	41cm	41cm	41cm
Výška sedáku / Výška sedadla	14-26cm	14-26cm	14-26cm
Hĺoubka sedu / Hĺbka sedu	30cm	35cm	40m
Úhlové nastavení / Uhlové nastavenie	0°-90°	0°-90°	0°-90°
Délka opěradla / Dĺžka operadla	40cm	56cm	75cm
Šířka opěradla / Šírka operadla	41cm	41cm	41cm
Hmotnost / Hmotnosť	4kg	4,5kg	5kg
Nosnost / Nosnosť	30kg	60kg	80kg

Vážení zákazníci,

Děkujeme za zakoupení dětského koupacího systému Otter.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ! Při skládání a rozkládání držte prsty mimo pohybující se části mechanismu!

UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojená.

POZOR! Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozkládání

Jednou rukou uchopte opěradlo a rukou druhou vysunete nohy koupacího systému směrem nahoru a obloukem mírně dolů. Nohy zajistíte tím, že je zatlačíte mírně proti lehátku.

Polohování zad

Vysuňte madlo polohování (7) směrem vzhůru a opěradlo nechte zapadnout do zámečků v požadované poloze.

Odejmutí potahu

Opěradlo i sedák koupacího systému uveďte do vzpřímené (kolmé) polohy a potah z něj sejměte směrem vzhůru. Potah je možno prát na 60°C v pračce.

Nastavení fixačních pásů a opěrky hlavy

Fixační pásy jsou nastavitelné nezávisle na sobě pomocí suchých zipů.

U opěrky hlavy lze navíc nastavit rozmezí mezi bočnicemi opěrky a to tak, že se posunou po páse.

ÚDRŽBA

1. Konstrukci pravidelně otírejte vlhkým hadříkem.
2. Potah perte na max 60°C s jemným pracím prostředkem.
3. Koupací systém Otter je možné omývat domácími desinfekčními přípravky.
4. Vždy osušte. Skladujte v suchém prostředí.
5. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky!
6. Kovové a šroubové spoje musí být pravidelně kontrolovány a šrouby dotahované.
7. Uživatelé koupacího systému nikdy nenechte bez dozoru.
8. Uživatelé koupacího systému nenechte vstávat a sedat bez asistence druhé osoby.
9. Při použití a manipulaci koupacího systému neohrožujte uživatele, Vás ani ostatní.

POZNÁMKA

Změna vyhrazena.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rám lehátka | 6. Omyvatelný, propustný potah |
| 2. Nastavitelná opěrka hlavy | 7. Madlo polohování |
| 3. Nastavitelný hrudní pás | |
| 4. Nastavitelný nožní pás | |
| 5. Nastavitelné nohy | |

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za zakúpenie detského kúpacieho systému Otter.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

UPOZORNENIE! Pri skladaní a rozkladaní držte prsty mimo pohybujúcej sa časti mechanizmu

UPOZORNENIE! Nechať dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné

UPOZORNENIE! Pred použitím sa presvedčte či sú všetky zaisťovacie zariadenia zapojené

PÓZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a odložte ho na neskoršie nahliadnutie. Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Rozkladanie

Jednou rukou uchopte operadlo a rukou druhú vysunie nohy kúpacieho systému smerom nahor a oblúkom mierne nadol. Nohy zaistíte tým, že je zatlačíte mierne proti lehátku.

Polohovanie chrbta

Vysuňte madlo polohovanie (7) smerom nahor a operadlo nechajte zapadnúť do zámočkov v požadovanej polohe.

Odňatie potahu

Operadlo i sedadlo kúpacieho systému uveďte do vzpriamenej (kolmej) polohy a potah z neho odstráňte smerom nahor. Potah je možné prať na 60°C v pračce.

Nastavenie fixačných pásov a opierky hlavy

Fixačné pásy sú nastaviteľné nezávisle na sebe pomocou suchých zipsov.

U opierky hlavy je možné navyše nastaviť rozmedzí medzi bočnicami opierky a to tak, že sa posunú po páse.

ÚDRŽBA

1. Konštrukciu pravidelne utierajte vlhkou handričkou.
2. Potah perte na max 60°C s jemným pracím prostriedkom.
3. Kúpacie systém Otter je možné umývať domácimi dezinfekčnými prípravkami.
4. Vždy osušte. Skladujte v suchom prostredí.
5. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky!
6. Kovové a skrutkové spoje musia byť pravidelne kontrolované a skrutky dotahovanie.
7. Užívateľ kúpacieho systému nikdy nenechajte bez dozoru.
8. Užívateľ kúpacieho systému nenechajte vstávať a sadieť bez asistencie druhej osoby.
9. Pri použití a manipulácii kúpacieho systému neohrožujte užívateľa, Vás ani ostatní.

POZNÁMKA

Změna vyhrazena.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rám lehátka | 6. Umývateľný, priepustný potah |
| 2. Nastaviteľná opierka hlavy | 7. Madlo polohovanie |
| 3. Nastaviteľný hrudný pás | |
| 4. Nastaviteľný nožný pás | |
| 5. Nastaviteľné nohy | |