

NÁVOD K POUŽITÍ

Speciální kočárek Ulises

Dodržujte návod k použití!

Pečlivě si přečtěte návod k použití kočárku a pečlivě uchovejte tento návod.

Děkujeme za zakoupení kočárku.

Kočárek má certifikaci CE.



Kočárek je zdravotnický prostředek třídy I. dle Směrnice 93/42/EEC dle Evropského práva.



Úvod

Ulises je perfektní kočárek vyvinutý pro každodenní použití. Kočárek byl vytvořen pro pacienty trpící onemocněním, které je nutí být v pozici vsedě, nebo pro které je nemožné stát. Pozice vsedě je pro invalidní dítě od narození důležitou součástí rehabilitačního procesu. Sedu předchází vzpřímené postavení dítěte. A co víc, má i významný vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Skutečnost, že by pacient mohl být bezpečně přepravován, je přínosem nejen pro něj, ale také pro jeho blízké a osoby, které o něj pečují.

Před použitím výrobku je uživatel povinen se seznámit s návodem k použití. Najdete zde nejen užitečné informace, ale také pokyny týkající se bezpečného a účinného používání kočárku. Pamatujte, že seznámení s obecnými zásadami je velice důležité! Tím, že budete seznámeni se všemi zásadami, zajistíte pacientovi bezpečnost a díky pečlivému přečtení si zajistíte i delší životnost výrobku.

Účel návodu

Uživatelská příručka obsahuje základní informace, které jsou nezbytné ke správnému používání výrobku, stejně tak jako ke správnému čištění, údržbě a přípravě kočárku. Současně zde najdete podmínky odpovědnosti za vady.

Návod k použití by měl být snadno dostupný, jelikož je určen pro lidi, kteří se o děti se zdravotním postižením starají, stejně tak je určen pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří provozují zařízení zaměřené na zdravotní postižení dětí.

Indikace

Tento produkt je určen pro pacienty s:

- různými typy mozkové obrny
- myelomenigokélou
- s poruchami mozku, míchy a jinými typy etymologie
- s poruchami svalů, které jsou spojené s obrnou a paralýzou
- s genetickými poruchami, které jsou spojené s obrnou
- s mozkovou příhodou, po úrazu páteře (poranění míchy a u zranění dolních končetin)
- ostatními chorobami spojenými s parézou, paralýzou a poškozením pohybového systému, který pacientovi znemožňuje pohyb bez pomoci.

Popis kočárku

Základní vybavení:

1. Nastavitelná a ergonomicky tvarovaná rukojeť
2. Pětibodový pás
3. Polohovací zádočná opěrka
4. Sedák
5. Úhlově nastavitelná stupačka se stabilizačními pásy
6. Ruční brzda
7. Spona pro nastavení úhlu opěradla
8. Kryt skládacího mechanismu
9. Nafukovací kola
10. PU kolečka otočná



Volitelné příslušenství:



UL_029 abdukční stehenní pás



UL_001 abdukční stehenní pás



UL_007 pánevní pás



UL_021 hlavová a krční opěrka



UL_024 bederní opěrka



UL_002 deštník



UL_025 6-bod. bezpečnostní vesta



UL_038 košík



UL_005 skládací stříška



UL_074 LED osvětlení



UL_013 pás trupu



UL_080 elastická polstrovaná záda



UL_014 4-bod. Bezpečnostní pás



UL_039 sedačková taška (pár)



UL_011 držák nápojů



UL_034 polštářky zúžení 3 cm pár



UL_036 stehenní pás



UL_012 elastický polstrovaný sed



UL_028 abdukční klín



UL_040 cestovní taška



UL_015 lýtkový pás



UL_065 polštářky zúžení 5 cm pár



UL_030 4-bod bezpečnostní vesta



UL_122 5-bod nožní pás



UL_010 bavlněný potah opěry hlavy



UL_032 elastická hlavová opěra



UL_048 držák kyslíkové bomby



UL_085 zadní plná kola



UL_090 přední foukací kola



UL_084 stříbrná zadní kola foukací

Velikosti a rozměry kočárku

Rozměry	Mjd	Velikost 1	Velikost 2	Velikost 3	Velikost 4
Šíře sedu	cm	34	38	42	47
Hloubka sedu	cm	28	30	38	38
Výška zádové opěrky	cm	55	65	71	83
Šířka zádové opěrky	cm	34	38	42	47
Vzdálenost stupačky od sedu	cm	24-30	27-35	24-35	33-41
Délka stupačky	cm	16	18	18	22
Výška vodícího madla	cm	106	106	109	114
Úhel sedu	st.	18	18	18	18
Úhel zádové opěrky	st.	115-135	115-135	115-131	110-135
Nosnost	kg	55	55	75	75
Celková šířka	cm	55	59	61	69
Šířka při složení	cm	55	59	61	69
Celková délka	cm	95	96	113	125
Délka při složení	cm	95	97	105	110
Celková výška	cm	106	106	109	114
Výška po složení	cm	43	43	46	46
Hmotnost	kg	16	17,5	18,5	21

Podrobný popis obsluhy kočárku

Složení kočárku

Uvolněte šrouby na stranách desky stupačky a sklopte desku stupačky ke kočárku. Odepněte polstry, které zakrývají skládací mechanismus, a položte je na zádovou opěrku. Odepněte suchý zip zezadu dole na zádové opěrce. Povolte šrouby po stranách zádové opěrky, které slouží na polohování zádové opěrky. Zatáhněte za pojistku skládacího mechanismu směrem nahoru. Pohybem vodícího madla k předním kolečkům dojde ke složení kočárku do velmi kompaktního tvaru.

Rozložení kočárku

Pohybem vodících madel od předních koleček dozadu až do zacvaknutí pojistky skládacího mechanismu se kočár rozloží. Polstry na bocích kočárku připevníme suchým zipem a zakryjeme skládací mechanismus. Nastavte úhel zádové opěrky a dotáhněte šrouby na stranách zádové opěrky. Na zadní straně zádové opěrky v dolní části připněte suchý zip k zádové opěrce. Desku stupačky odklopte a nastavte správný úhel a dotáhněte.

Stupačka

Je možné nastavit výšku stupačky. Vyjměte aretaci na obou trubkách, na kterých stupačka drží. Nastavte výšku stupačky a aretaci opět zasuňte zpět. Nastavení úhlu stupačky je možné povolením šroubů po stranách desky stupačky. Stupačka je vybavena nožními stabilizačními pásky. Pásky lze nastavit pomocí suchých zipů.

Kola a brzdy

Kočárek je vybavený předními otočnými koly. Brzdy jsou umístěny na zadních kolech. Červené páčky na obou kolech přitáhněte pro aretaci.

Zádová opěrka a vodící madlo

Vodící madlo lze úhlově nastavit pomocí tlačítek umístěných z boku na kloubech. Stlačením obou tlačítek uvolníte mechanismus a můžete změnit úhel vodícího madla.

Úhel zádové opěrky lze změnit povolením šroubů po stranách zádové opěrky, nastavením úhlu a dotažením šroubů.

V zádové opěrce jsou připravené otvory pro montáž různých příslušenství jako jsou pásy, bederní opěrky, opěrka hlavy a další.

Pětibodový bezpečnostní pás

Kočárek je v základu vybavený pětibodovým bezpečnostním pásem, který stabilizuje uživatele a zajišťuje ho proti pádu z kočárku. Pro montáž pásu zvolte správnou výšku na zádové opěrce a protáhněte konce pásů skrz polstr. Pro ukotvení pásů na druhé straně slouží otvor nahoře zádové opěrky krytý suchým zipem. Další dva díly pásu se připevňují do přezky na rámu kočárku po stranách. Pátý díl se připevňuje do sedačky. Pro sepnutí všech pět pásů do sebe k sobě přiložte dva díly ze zad a z boků a společně je zasuňte do přezky na pátém pásu ze sedačky. Nastavení délky pásů lze pomocí přezek nebo zatažením za konce pásů.

POZOR! Kočárek smí být používán pouze v souladu s indikacemi, které jsou popsány v této uživatelské příručce. Kromě toho je velmi důležité s tímto návodem seznámit jak pacienta, tak obsluhu, která tento kočárek bude používat. Vše je nutné nastudovat před užíváním kočárku.

Používání kočárku

Před použitím kočárku, je nezbytné se ujistit, aby bylo pacientovo oblečení vzdušné a pohodlné, vhodné je sportovní oblečení - obuv by měla být pohodlná a navíc by měla stabilizovat kotníky.

Pacient, který kočárek používá, nesmí být obnažený, a to zvláště na místech, kde se kůže dotýká čalounění.

Drény, tašky, katétry a další, (pokud jsou používány) musí být zajištěny tak, aby správně fungovaly a neporušily se během používání zařízení.

POZOR! Oblečení by mělo chránit pacienta před přímým kontaktem s čalouněním, stejně tak jako před ostatními částmi zařízení.

Před použitím kočárku je nutné:

- 1) Rozložit kočárek
- 2) Nastavit úhel opěrky zad a nastvit kočárek na míry uživatele
- 3) Rozepnout pásy
- 4) Zablokovat brzdy
- 5) Správně umístit pacienta do kočárku
- 6) Upevnit pásy, vestu, stabilizační pásy, pásy na nohy apod.
- 7) Namontovat dodatečné vybavení kočárku

V případě, že má pacient problémy s inkontinencí, je vhodné, aby měl pod sebou speciální podložku proti inkontinenci.

Pokud se na cestách setkáte s překážkami (obrubník, práh), je nezbytné, abyste pomocí rukojeti nadzvedli přední kola. Poté umístěte přední kola na překážku a nadzvedněte kočárek, aby se zadní kola přes překážku dostala.

Bezpečnostní pravidla

Při výběru kočárku je důležité se poradit se svým lékařem nebo ergoterapeutem a to zejména ve věci výběru správného kočárku a jeho správné velikosti.

Je také důležité se seznámit s pokyny popsány v tomto návodu k použití před tím, než začnete kočárek používat.

Před použitím proveďte následující kroky:

- Ujistěte se, že zařízení není poškozené nebo nemá jiné závady, které by mohly ohrozit pacienta
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách
- Zkontrolujte, zda správně fungují brzdy
- Zkontrolujte, zda jsou kola správně namontována
- Zkontrolujte, zda je vše správně zaaretováno, stejně tak zkontrolujte, zda jsou veškeré úchytky ve správné poloze
- Zkontrolujte, zda je zajišťovací úchyt správně umístěn proti automatickému skládání
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení nastaveny dle potřeb pacienta, např.: úhel sklonu opěrky zad, délka stupačky atd...
- Zkontrolujte, zda jste zapnuli bezpečnostní pás poté, co jste umístili pacienta do zařízení
- Ujistěte se, že je pacient zabezpečen pomocí prvků, jako jsou vesty, stabilizační pásy nohou, peloty, abdukční klín, opěrka hlavy, pokud je jimi kočár vybaven

Je zakázáno používat kočárek k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

Je zakázáno nechat pacienta bez dozoru.

Je zakázáno opustit pacienta umístěného v kočárku na nestabilním povrchu, i když jste kočárek zabrzdili.

Je zakázáno s kočárkem jezdit po schodech nahoru nebo sjíždět dolů. Nezáleží na tom, zda je pacient umístěn v kočárku nebo ne.

Při umísťování pacienta do kočárku a z kočárku je důležité se ujistit, zda pacient nestojí na stupačkách. Pacient nesmí být umístěn v kočárku, když je v autě, autobusu, vlaku atd.

Vždy, když budete chtít pacienta z kočárku vyprostit nebo jej umístit do kočárku, používejte brzdu!

Je zakázáno dávat do kapes na kočárku těžké předměty. Mohlo by se stát, že kočárek ztratí stabilitu.

Ujistěte se, zda nejsou končetiny v blízkosti nastavitelných prvků.

Zajistěte kočárek během přepravy, zabrání se tak případným škodám.

Výrobce kočárku nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku!

Pamatujte, že se těžiště kočárku při jízdě na nerovném terénu mění. V tomto případě buďte velice opatrní.

POZOR! Výrobek obsahuje malé části, které by mohly děti spolknout!

Údržba a čištění

Dětský kočárek by měl být udržován v čistotě a používán v souladu s doporučením výrobce. Kočárek by měl být v čistém, suchém a větraném prostoru. Údržba i čištění musí být prováděna nejméně jednou za měsíc. Pravidelné čištění a údržba kočárku jsou nezbytné pro udržení jeho správné funkce, stejně jako pro bezpečnost.

Je velmi vhodné pamatovat na správnou údržbu za účelem estetiky produktu pomocí následujících doporučení:

1. Doporučuje se čištění čalounění pomocí čisticího prostředku a teplé vody.
2. V případě skvrn na čalounění je třeba čalounění čistit houbičkou nebo měkkým kartáčem. Nedoporučuje se čalounění čistit tvrdými kartáči.
3. Je zakázáno čistit čalounění silnými chemickými látkami, jako jsou rozpouštědla nebo žíravé chemikálie.
4. Čalounění se během čištění nesmí promočit.
5. Je zakázáno provádět jakoukoli údržbu, když je pacient uvnitř kočárku.
6. Kovové a plastové prvky by měly být čištěny ručně pomocí přípravků, které jsou určeny pro plasty.

POZOR! Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neoprávněnou osobou! Ujistěte se, že je čalounění suché před tím, než výrobek použijete! Výrobce nese zodpovědnost pouze za skryté vady nebo škody, které se objevily a to navzdory skutečnosti, že se uživatel řídil zmíněnými pokyny.

Podmínky odpovědnosti za vady

Výrobce nese odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. Všechny defekty, které se projeví v průběhu doby odpovědnosti za vady, budou bezplatně opraveny. Reklamací můžete uplatnit v místě prodeje nebo přímo u výrobce. V případě reklamace je důležité, aby byl výrobek v originálním balení a aby balení bylo zajištěné proti poškození. Jakékoliv škody způsobené nedostatečnou ochranou během přepravy nejsou předmětem opravy. Reklamací nelze uplatnit v případě, že byl balík se zařízením nepojištěný.

1. Doba odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu opravy.
2. Oprava na základě odpovědnosti za vady nezahrnuje činnosti popsané v návodu k obsluze, které by měly být provedeny samotným uživatelem a na jeho / její náklady.
3. Příklad by měl být používán v souladu s návodem k použití. V případě, že není používán v souladu s pravidly, vede toto ke ztrátě odpovědnosti za vady.
4. Veškeré škody vyplývající z nesprávného použití, údržby, jakož i skladování nejsou předmětem odpovědnosti za vady. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na běžné opotřebení – odpovědnost za vady se na něj nevztahuje. Kupující si v těchto případech hradí sám veškeré opravy.
5. Výrobce varuje před opravami v neautorizovaných servisech. Takto provedené opravy a úpravy vedou ke ztrátě odpovědnosti za vady.
6. Výrobce i prodejce nabízí placený, pozáruční servis zakoupených kočárků.

Je zakázáno provádět jakékoli změny týkající se struktury kočárku. Takové změny mohou být nebezpečné a vedou ke ztrátě odpovědnosti za vady. Na kočárek se vztahuje odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě potřeby náhradních dílů kontaktujte prodejce. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prodejce.