

NÁVOD K POUŽITÍ

Speciální kočárek Racer

Dodržujte návod k použití!

Pečlivě si přečtěte návod k použití kočárku

Racer a pečlivě uchovejte tento návod.

Děkujeme za zakoupení kočárku Racer.

Kočárek má certifikaci CE.



Obsah

Úvod.....	2
Účel návodu	2
Indikace.....	2
Popis kočárku Racer.....	3
Podrobný popis obsluhy kočárku Racer	5
Montáž volitelného příslušenství	9
Používání kočárku	10
Bezpečnostní pravidla	11
Údržba a čištění	12
Podmínky odpovědnosti za vady.....	12

Úvod

Kočárek Racer byl vytvořen pro pacienty trpící onemocněním, které je nutí být v pozici vsedě, nebo pro které je nemožné stát. Pozice vsedě je pro invalidní dítě od narození důležitou součástí rehabilitačního procesu. Sedu předchází vzpřímené postavení dítěte. A co víc, má i významný vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Skutečnost, že by pacient mohl být bezpečně přepravován, je přínosem nejen pro něj, ale také pro jeho blízké a osoby, které o něj pečují. Správné použití bezpečnostních klínů, pásů a pelot umožňuje i správné vzpřímené postavení pacienta, a to i v případě pacientů s paralýzou. Stejně tak zabraňuje kontrakturám a dalším deformacím.

Před použitím výrobku je uživatel povinen se seznámit s návodem k použití. Najdete zde nejen užitečné informace, ale také pokyny týkající se bezpečného a účinného používání kočárku. Pamatujte, že seznámení s obecnými zásadami je velice důležité! Tím, že budete seznámeni se všemi zásadami, zajistíte pacientovi bezpečnost a díky pečlivému přečtení si zajistíte i delší životnost výrobku.

Účel návodu

Uživatelská příručka obsahuje základní informace, které jsou nezbytné ke správnému používání výrobku, stejně tak jako ke správnému čištění, údržbě a přípravě kočárku. Současně zde najdete podmínky odpovědnosti za vady.

Návod k použití by měl být vždy na viditelném a dobře přístupném místě, jelikož je určen pro lidi, kteří se o děti se zdravotním postižením starají, stejně tak je určen pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří provozují zařízení zaměřené na zdravotní postižení dětí.

Indikace

Tento produkt je určen pro pacienty s:

- různými typy mozkové obrny
- myelomenigokélou
- s poruchami mozku, míchy a jinými typy etymologie
- s poruchami svalů, které jsou spojené s obrnou a paralýzou
- s genetickými poruchami, které jsou spojené s obrnou
- s mozkovou příhodou, po úrazu páteře (poranění míchy a u zranění dolních končetin)
- ostatními chorobami spojenými s parézou, paralýzou a poškozením pohybového systému, který pacientovi znemožňuje pohyb bez pomoci.

Popis kočárku Racer

Základní vybavení:

1. Nastavitelná a ergonomicky tvarovaná rukojeť
2. Zádová opěrka
3. Sedák
4. Opěrka hlavy
5. 4 bodová fixační vesta
6. Boční peloty
7. Bezpečnostní hrazdička
8. Abdukční klín
9. Stupačky se stabilizačními pásy
10. Ruční brzda
11. Spona pro nastavení úhlu opěradla
12. Skládací mechanismus
13. Pojistka proti nechtěnému složení
14. Kryt skládacího mechanismu
15. Postranní lýtkové peloty
16. Zámek otočného kolečka
17. Matice kol
18. Nafukovací kola
19. PU kolečka



Volitelné příslušenství:



RC_001 abdukční stehenní pás



RC_002 slunečník



RC_003 stolek



RC_004 stříška s krytem kočárku



RC_005 stříška



RC_006 taška



RC_007 pánevní pás




RC_008 PU kola



RC_010 potah hlavové opěrky



RC_011 držák nápojů

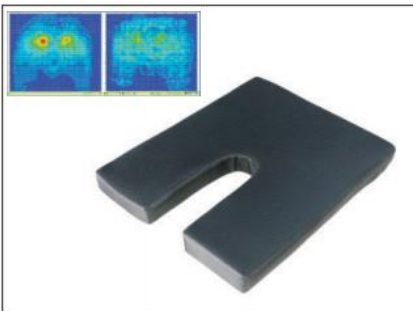

RC_012 elastický antidekub. sedák



RC_014 čtyřbodový pás



RC_017 nánožník



RC_018 nízká opora hlavové části



RC_019 vysoká opora hlavové části



RC_020 stříška s bočním zakrytím



RC_025 šestibodový pás



RC_026 hrudní pás



RC_034 polstrování boků 3 cm



RC_037 pláštěnka



RC_071 plexistolek

Velikosti a rozměry kočárku

Velikost	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)	Výška kočárku (cm)	Šířka kočárku (cm)	Délka kočárku (cm)	Výška balení (cm)	Šířka balení (cm)	Délka balení (cm)
1	35	22	107	62	123	56	73	105
2	50	23	107	64	135	56	73	105
3	60	27	110	68	165	58	73	123

Velikost	Šíře sedu (cm)	Hloubka sedu (cm)	Šíře zádové opěrky (cm)	Vzdálenost mezi sedem a stupačkou (cm)	Úhel sedu (stupně)	Úhel stupaček (stupně)	Délka stupaček (cm)	Vzdálenost mezi opěrou zad a abdukčním klínem (cm)
1	Min	-	-	-	28	-	110	-
	Max	32	33	30	35	120	130	24
2	Min	-	-	-	30	-	110	-
	Max	34	44	32	36	120	130	24
3	Min	-	-	-	40	-	110	-
	Max	40	46	36	45	120	130	24

Podrobný popis obsluhy kočárku Racer

Rozložení kočárku

a) Uvolněte svorku pro nastavení úhlu sklonu opěradla. Potom zatlačte opěradlo dozadu a zajistěte jej pomocí svorky.



b) Zatáhněte za rukojeť směrem nahoru, dokud není skládací mechanismus zajištěn. Nezapomeňte zajistit rukojeť pomocí lišty. Je důležité ujistit se, zda je lišta zvednutá nahoru, teprve pak můžete zajistit západku skládacího mechanismu. Skládací mechanismus zamknete tak, že lištu zatáhnete směrem dolů.



c) Umístěte lištu na kočárek rámu tak, aby bylo možné ji namontovat. Pro odmontování je nutné stisknout tlačítka, která se nachází na obou stranách lišty.



Složení kočárku pro snadný transport

Složení kočárku probíhá opačně než jeho rozkládání. Abyste kočárek složili, postupujte v tomto pořadí:

- Nejprve odstraňte hrazdičku – zatlačte na tlačítko uvolnění, které se nachází na obou stranách lišty, poté lištu vytáhněte z rámu.
- Zvedněte kryt skládacího mechanismu.
- Odemkněte rukojeť – zvedněte horní část skládacího mechanismu společně s lištou. Dále posuňte lištu dopředu směrem ke stupačkám.



- Uvolněte svorku (nastavení úhlu sklonu) opěradla a opěradlo sklopte.



Nastavení sklonu opěradla

Ke správnému nastavení sklonu opěradla je nutné provést tyto kroky:

- pomocí jedné ruky uchopte zádovou opěrku
- pomocí druhé ruky uvolněte svorku úhlu opěradla
- upravte polohu opěradla dle Vašeho uvážení
- svorku, kterou jste uvolnili, zaaretujte



Nastavení délky stupačky

Ke správnému nastavení délky stupačky je nezbytné:

- odstranit západky, které jsou umístěny na obou stranách stupaček.
- nastavit výšku stupačky dle Vašich potřeb
- upevnit západky do správných otvorů.



Nastavení polohy opěrky nohou/ stupačky

Postupujte podle následujících pokynů, abyste správně nastavili pozici/polohu stupačky:

- Mírně odlehčete stupačku a stiskněte tlačítko po straně pro nastavení úhlu stupačky.
- Upravte stupačky dle požadavků pacienta
- Stupačku zaaretujte



Stabilizační pás na nohy

Kočárek RACER je vybaven stabilizačními pásy na nohy.

Tyto pásy jsou vybaveny suchými zipy, které usnadní připevnění pacientových nohou.



Boční peloty

Kočárek RACER je vybaven bočními pelotami (2 kusy, na každé straně jedna), které se dají snadno připevnit nebo odstranit pomocí suchých zipů.



Opěrka hlavy

Opěrka hlavy je k zadové opěrce připevněna pomocí speciálních pásů. Tyto pásy umožňují snadné nastavení výšky opěrky hlavy.



Vesta

Vesta je namontována na zadové opěrce pomocí pásů, které jsou upevněny jak na horní, tak na spodní části zadové opěrky. Na konci pásů jsou patentní knoflíky pro lepší uchycení. Aby bylo možné vestu připevnit, je nutné pásy připevnit pomocí čtyř přezek. Dále je nezbytné pásy nastavit, aby vyhovovaly pacientovi. Tento krok je velice důležitý, protože zajišťuje bezpečí pacienta před vypadnutím.



Ruční brzdy

Kočárek je vybaven dvěma ručními brzdami, které se nacházejí na zadních kolech.

Aby bylo možné kočárek přibrzdit nebo zabrzdit, je třeba stisknout ruční brzdou.

V případě, že je zapotřebí kola odbrzdit, je nutné páčku zvednout směrem nahoru.



Nastavitelná rukojeť

Stiskněte současně dvě tlačítka umístěná na obou stranách rukojeti, poté můžete rukojeť nastavit dle potřeby.



Abdukční klín

Abdukční klín je ke kočárku upevněn pomocí matice. Abdukční klín je možné posunout buď podélně, nebo napříč.



Kola

RACER kočárek je vybaven nafukovacími koly a předními otočnými PU kolečky, která lze aretovat pomocí pojistky. V případě potřeby je možné PU kola uvolnit.

Při přepravě je možné odmontovat zadní kola. V případě, že budete chtít kola odebrat, je nezbytné odšroubovat matice, poté můžete kola vyjmout z nápravy. Nezapomeňte však udržovat správný tlak v kolech. Ten by měl být 230 kPa (0,23 MPa)



POZOR! Pokud jsou kola špatně nahuštěna, může se stát, že se Vám kola poruší nebo by mohlo dojít k nechtěné nehodě.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nemažte ložiska kol! Nerozebírejte přední kola kočárku!


Montáž volitelného příslušenství

Stehenní abdukční pás

Dodržujte tyto kroky pro správné namontování stehenního abdukčního pásu:

- Umístěte pásy na sedadlo a připevněte je do otvorů, které se nacházejí na rohu sedadla.
- Prostrčte pásy okolo bočních tyčí u zádové opěrky, dále vložte pásy do otvorů na sedadle.
- Upevňovací popruh proložte skrz přezku, která se nachází na pásu.
- Pomocí přezky upevněte pás.

Všechny kroky opakujte, aby byl pás správně připevněn na obou stranách.

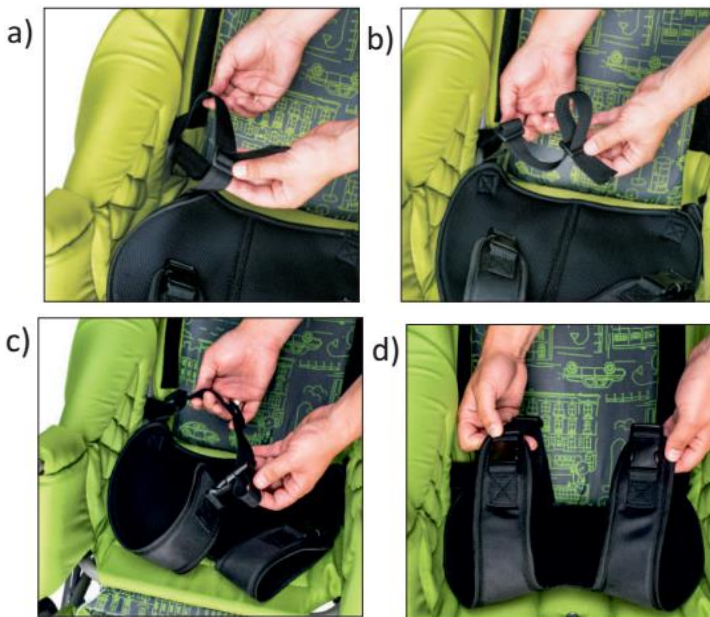

Pracovní deska

Při montáži desky je nutné:

- demontovat bezpečnostní hrazdičku
- stisknout současně zámky, které jsou umístěny na vnější straně pracovní desky a vložit desku na místo, kde byla umístěna bezpečnostní hrazdička.



Stříška

Při montáži stříšky je nutné provést následující kroky:

- Stiskněte tlačítka, která se nacházejí na obou stranách stříšky, poté umístěte stříšku na boční rám kočárku.
- Rozviňte stříšku
- Uzamkněte natahovací lišty, které se nacházejí na obou stranách stříšky.



Stříška s krytem

Namontujte stříšku v souladu s pravidly popsanými výše, teprve potom lze namontovat kryt stříšky. Dále postupujte tak, že přední stranu krytu upevníte na přední část stříšky pomocí zipu.

Zadní strana krytu by měla být připevněna k zadní části stříšky. Dále pomocí zipu připevněte zadní stranu krytu ke straně krytu.



Zimní nánožník

Je důležité, umístit fusak na zádovou opěrku a na stupačky. Tento fusak je vybaven speciálním otvorem, který je vytvořen pro abdukční klín a otvory na pásy u vesty.

Vnitřek nánožníku je lemovaný měkkou kožešinou, která chrání pacienta před nízkými teplotami.



Šestibodová vesta

Při montáži šestibodové vesty je nezbytné, aby byl pacient umístěn v kočárku. Vesta by měla být připevněna pomocí čtyř upevňovacích prvků. Tyto prvky připevněte k zádové opěrce na místo standardní vesty.



Hrudní pás

Hrudní pás je upevněn za zádovou opěrkou pomocí suchého zipu.



POZOR! Kočárek RACER smí být používán pouze v souladu s indikacemi, které jsou popsány v této uživatelské příručce. Kromě toho je velmi důležité s tímto návodem seznámit jak pacienta, tak obsluhu, která tento kočárek bude používat. Vše je nutné nastudovat před užíváním kočárku.

Používání kočárku

Před použitím kočárku, je nezbytné se ujistit, aby bylo pacientovo oblečení vzdušné a pohodlné, vhodné je sportovní oblečení - obuv by měla být pohodlná a navíc by měla stabilizovat kotníky.

Pacient, který kočárek používá, nesmí být obnažený, a to zvláště na místech, kde se kůže dotýká čalounění.

Drény, tašky, katétrů a další, (pokud jsou používány) musí být zajištěny tak, aby správně fungovaly a neporušily se během používání zařízení.

POZOR! Oblečení by mělo chránit pacienta před přímým kontaktem s čalouněním, stejně tak jako před ostatními částmi zařízení.

Pro správné používání zařízení je nutné zvládat následující:

- 1) Rozložit kočárek
- 2) Nastavit opěrku zad a úhel stupaček
- 3) Vymontovat lištu a pracovní stůl
- 4) Umět rozepnout pásy, vestu atd.
- 5) Správně umístit pacienta do kočárku
- 6) Upevnit pásy, vestu, stabilizační pásy, pásy na nohy apod.
- 7) Zvládnout namontovat veškeré vybavení kočárku

V případě, že má pacient problémy s inkontinencí, je vhodné, aby měl pod sebou speciální podložku proti inkontinenci.

Pro udržení správného směru jízdy, je nezbytné používat rukojeť!

Nenechávejte nezabrzdný kočárek stát na nerovném povrchu.

Pokud se na cestách setkáte s překážkami (obrubník, práh), je nezbytné, abyste pomocí rukojeti nadzvedli přední kola. Poté umístěte přední kola na překážku a nadzvedněte kočárek, aby se zadní kola přes překážku dostala.

Bezpečnostní pravidla

Při výběru kočárku je důležité se poradit se svým lékařem nebo fyzioterapeutem a to zejména ve věci výběru správného kočárku a jeho správné velikosti.

Je také důležité se seznámit s pokyny popsány v tomto návodu k použití před tím, než začnete kočárek používat.

Před použitím proveďte následující kroky:

- Ujistěte se, že zařízení není poškozené nebo nemá jiné závady, které by mohly ohrozit pacienta
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách
- Zkontrolujte, zda správně fungují brzdy
- Zkontrolujte, zda jsou kola správně namontována
- Zkontrolujte, zda je vše správně zaaretováno, stejně tak zkontrolujte, zda jsou veškeré úchytky ve správné poloze
- Zkontrolujte, zda je zajišťovací úchyt správně umístěn proti automatickému skládání
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení nastaveny dle potřeb pacienta, např.: úhel sklonu opěrky zad, délka stupačky atd...
- Zkontrolujte, zda jste namontovali bezpečnostní lištu poté, co jste umístili pacienta do zařízení
- Ujistěte se, že je pacient zabezpečen pomocí prvků, jako jsou vesty, stabilizační pásy nohou, peloty, abdukční klín, opěrka hlavy

Nezapomínejte pacienta zajistit! Je to velice důležitý krok k tomu, aby byl chráněn před vypadnutím!

V případě, že se u pacienta objevují kontraktury, doporučujeme Vám používat abdukční klín, aby se zabránilo vředům mezi koleny.

Je zakázáno používat kočárek k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

Je zakázáno nechat pacienta bez dozoru.

Je zakázáno opustit pacienta umístěného v kočárku na nestabilním povrchu, i když jste kočárek zabrzdili.

Je zakázáno s kočárkem jezdit po schodech nahoru nebo sjíždět dolů. Nezáleží na tom, zda je pacient umístěn v kočárku nebo ne.

Při umísťování pacienta do kočárku a z kočárku je důležité se ujistit, zda pacient nestojí na stupačkách. Pacient nesmí být umístěn v kočárku, když je v autě, autobusu, vlaku atd.

Vždy, když budete chtít pacienta z kočárku vyprostit nebo jej umístit do kočárku, používejte brzdu!

Je zakázáno dávat do kapes na kočárek těžké předměty. Mohlo by se stát, že kočárek ztratí stabilitu.

Ujistěte se, zda nejsou končetiny v blízkosti nastavitelných prvků.

Zajistěte kočárek během přepravy, zabrání se tak případným škodám.

Výrobce kočárku nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku!

Pamatujte, že se těžiště kočárku při jízdě na nerovném terénu mění. V tomto případě buďte velice opatrní.

POZOR! Výrobek obsahuje malé části, které by mohly děti spolknout!

Údržba a čištění

Dětský kočárek by měl být udržován v čistotě a používán v souladu s doporučením výrobce. Přístroj by měl být v čistém, suchém a větraném prostoru. Údržba i čištění musí být prováděna nejméně jednou za měsíc. Pravidelné čištění a údržba kočárku jsou nezbytné pro udržení jeho správné funkce, stejně jako pro bezpečnost.

Je velmi vhodné pamatovat na správnou údržbu za účelem estetiky produktu pomocí následujících doporučení:

1. Doporučuje se čištění čalounění pomocí čisticího prostředku a teplé vody.
2. V případě skvrn na čalounění je třeba čalounění čistit houbičkou nebo měkkým kartáčem. Nedoporučuje se čalounění čistit tvrdými kartáči.
3. Je zakázáno čistit čalounění silnými chemickými látkami, jako jsou rozpouštědla nebo žíravé chemikálie.
4. Čalounění se během čištění nesmí promočit.
5. Je zakázáno provádět jakoukoli údržbu, když je pacient uvnitř kočárku.
6. Kovové a plastové prvky by měly být čištěny ručně pomocí přípravků, které jsou určeny pro plasty.

POZOR! Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neoprávněnou osobou! Ujistěte se, že je čalounění suché před tím, než výrobek použijete! Výrobce nese zodpovědnost pouze za skryté vady nebo škody, které se objevily a to navzdory skutečnosti, že se uživatel řídil zmíněnými pokyny.

Podmínky odpovědnosti za vady

Výrobce nese odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. Všechny defekty, které se projeví v průběhu doby odpovědnosti za vady, budou bezplatně opraveny. Náklady na dodání se vztahují na prodejce. Reklamací můžete uplatnit v místě prodeje nebo přímo u výrobce. V případě reklamace je důležité, aby byl výrobek v originálním balení a aby balení bylo zajištěné proti poškození. Jakékoliv škody způsobené nedostatečnou ochranou během přepravy nejsou předmětem opravy. Reklamací nelze uplatnit v případě, že byl balík se zařízením nepojištěný.

1. Doba odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu opravy.
2. Oprava na základě odpovědnosti za vady nezahrnuje činnosti popsané v návodu k obsluze, které by měly být provedeny samotným uživatelem a na jeho / její náklady.
3. Přístroj by měl být používán v souladu s návodem k použití. V případě, že není používán v souladu s pravidly, vede toto ke ztrátě odpovědnosti za vady.
4. Veškeré škody vyplývající z nesprávného použití, údržby, jakož i skladování nejsou předmětem odpovědnosti za vady. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na běžné opotřebení – odpovědnost za vady se na něj nevztahuje. Kupující si v těchto případech hradí sám veškeré opravy.
5. Výrobce varuje před opravami v neautorizovaných servisech. Takto provedené opravy a úpravy vedou ke ztrátě odpovědnosti za vady.
6. Výrobce i prodejce nabízí placený, pozáruční servis zakoupených kočárků.

Je zakázáno provádět jakékoli změny týkající se struktury kočárku. Takové změny mohou být nebezpečné a vedou ke ztrátě odpovědnosti za vady. Na kočárek se vztahuje odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě potřeby náhradních dílů kontaktujte prodejce. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prodejce.