

GEPARD ROLLATOR

Art. 312401, 312402, 312403, 312404, 312405 (HD),
312406, 312407, 312408

Uživatelská příručka



Lehké chodítko z uhlíkových vláken
HD (maximální zatížení 200 kg)
Nákupní taška s max. nosností 5 kg



Standardní
Výška sedadla 62 cm
Maximální zatížení
150 kg
Karbonově černá,
žlutá, fialovo-černá



HD a malé
Výška sedadla 62/55 cm
K dispozici jsou měkká kola
Pouze karbonově černá



Měkká kola
Výška sedadla 62 cm
Maximální zatížení
150 kg
Karbonová černá,
žlutá, fialová/černá



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vysoce kvalitní produkt Mobilex. Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o používání zdravotnického prostředku. Má vám pomoci při správném a bezpečném používání výrobku. Je velmi důležité, abyste si návod před použitím přístroje pečlivě přečetli. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a vždy je dodržujte. Společnost Mobilex se neustále snaží své výrobky vylepšovat a modernizovat. Proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikací a technických údajů výrobku bez dalšího upozornění.

Zamýšlené použití zařízení

Tento výrobek je zdravotnický prostředek, který byl navržen pro zvýšení mobility osob, které mají potíže se stáním nebo chůzí. Chodítko umožňuje těmto osobám znovu získat schopnost vykonávat každodenní činnosti. Chodítko je vhodný pro osoby, které v důsledku různých onemocnění potřebují stabilní oporu při chůzi. Chodítko by měl být používán pouze jako opora při stání a chůzi. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace

Chodítko je zdravotnický prostředek určený na pomoc lidem s funkčním omezením. Indikací k použití jsou onemocnění, která způsobují omezení pohyblivosti a postižení, bránící samostatnému sezení, stání a chůzi. Proto je při provádění výše uvedených činností zapotřebí další stabilní opora. Indikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, ale hlavními cílovými skupinami uživatelů jsou starší lidé, osoby s parézou, revmatickým onemocněním a další osoby s omezenou pohyblivostí bederní páteře, kolen nebo kyčlí. Používání výrobku k jiným než výše popsáním účelům je zakázáno.

Kontraindikace

Chodítka nejsou určeny pro osoby, které nedokážou udržet správnou rovnováhu těla ve stoje. Zařízení se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s vnímáním. Kontraindikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele. Výběr ortopedické pomůcky vhodné pro daný klinický obraz musí být vždy proveden s pomocí odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Kromě toho dodržujte bezpečnostní informace uvedené v kapitole 2.

Oblasti použití

Výrobek lze použít v domácí péči, zdravotnických zařízeních a zařízeních dlouhodobé péče a v nemocnicích.

Zdravotní příhody a nežádoucí události

V případě nežádoucích událostí souvisejících se zařízením se obraťte na prodejce nebo výrobce:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

Bezpečnostní požadavky

- Ujistěte se, že si tento návod přečetly všechny osoby, které přístroj používají.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu.
- V případě zjištění závad nebo chyb musíte okamžitě přestat přístroj používat a kontaktovat prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a varování výrobce.
- Dbejte na informace uvedené na štítku výrobku.
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu.
- Na zařízení nelezte.
- Neprovádějte na zařízení konstrukční změny, pokud nemáte písemný souhlas výrobce s takovými úpravami.
- Zařízení a brašna nesmí být zatíženy větší hmotností, než je uvedeno v Technických údajích.
- Všechna kola MUSÍ být během používání zařízení po celou dobu v kontaktu s podlahou. Tím se zajistí správné vyvážení chodítka a mělo by se snížit riziko nehod.
- Při montáži nebo seřizování jakýchkoli částí zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují.
- Chodítko používejte pouze po jeho úplném rozložení a aktivaci blokovacího zařízení.
- Sedačku lze používat pouze tehdy, když jsou aktivovány parkovací brzdy.
- Obě brzdy by měly být vždy aktivovány nebo zablokovány současně.
- Na sedačce není dovoleno přenášet osoby nebo předměty, pokud je chodítko v pohybu.
- Parkovací brzdy musí být vždy aktivovány, pokud se chodítko nepoužívá.

Dodávané díly

Zařízení se dodává v papírové krabici. Obsahem balení je:

- 1 Chodítko ve složeném stavu včetně namontovaného sedadla, zádového pásu a nákupní tašky;
- 1 držák na hůl, nenamontovaný (v plastovém sáčku v boční kapse tašky);
- 1 návod k použití;

Předběžná kontrola

Zkontrolujte obsah krabice s výše uvedeným seznamem. Pokud v této fázi zjistíte, že některý díl chybí nebo je poškozen, neprodleně kontaktujte svého dodavatele.

3. Popis

Popis produktu

Chodítko Gepard má rám z uhlíkových vláken a 4 kola. Díky lehkému rámu jej lze snadno složit a nabízí snadné skladování a přepravu. Chodítko se snadno pohybuje a je dostatečně stabilní. Výšku rukojetí pro tlačení lze nastavit. Chodítko je dodáváno s namontovaným sedátkem, zádovním popruhem a nákupní taškou.

Chodítko se skládá z následujících prvků:

1. Tlačná rukojeť
2. Brzdová páka
3. Sedlová trubka
4. Knoflík pro nastavení výšky rukojeti
5. Brzda
6. Zadní kolo
7. Opěradlo
8. Tlačítko zámku sklápění
9. Skládací popruh
10. Nákupní taška
11. Přední otočné kolečko

Popis sestavy

Toto zařízení nevyžaduje montážní návod.

Popis funkce

Skládání/rozkládání rámu

Chcete-li rám rozložit, stiskněte tlačítko zámku skládání a zatlačte na trubky sedadla, dokud se rám nerozloží a "necvakne", což znamená, že je chodítko uzamčeno v rozložené poloze. Chcete-li rám složit, vytáhněte skládací popruh nahoru a dokončete skládání rámu zatlačením sedlových trubek k sobě, dokud tlačítko zámku skládání "necvakne".

POZOR! Trubky sedadla musí při rozkládání chodítka pevně zapadnout na obou stranách. Všechny díly musí být pevně zajištěny, než je možné chodítko používat. Nedodržení těchto upozornění může vést ke zranění.

Nastavení výšky rukojeti

Chcete-li nastavit výšku tlačné rukojeti, uvolněte knoflík pro nastavení výšky a posuňte rukojeť do požadovaného nastavení. Utáhněte knoflík a opakujte pro druhou rukojeť.

POZNÁMKA: Obě rukojeti by měly být vždy ve stejné výšce. Správná výška tlačných rukojetí by měla být vždy ve výšce zápěstí uživatele, který stojí s rukama podél těla.

Brzdy

Brzdy se aktivují postupným zatažením za brzdové páky s rostoucí silou. Brzdy jsou plně aktivovány, když se brzdové páky dotknou rukojetí a vozík se zcela zastaví. Chcete-li brzdění zastavit, pusťte brzdové páky.

Chodítko je také vybaveno funkcí parkovací brzdy. Pro zapnutí parkovací brzdy zatlačte brzdové páky dolů. Chcete-li parkovací brzdou vypnout, zatáhněte brzdové páky zpět do neutrální polohy.

POZOR! Pokud vozík nepoužíváte, vždy aktivujte parkovací brzdou! Při umístění chodítka na nerovinný povrch musíte vždy aktivovat parkovací brzdou!

POZOR! Brzdy musí být při odstavení chodítka vždy v zablokované poloze! Nikdy nepoužívejte sedačku, pokud nejsou brzdy zajištěny! Při sezení se nikdy nenaklánějte dozadu. Doporučuje se sedět pouze v přední části sedadla. Nesedějte si na vak.

Příslušenství

Přístroj lze vybavit následujícím příslušenstvím (není součástí standardní výbavy):


- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| ✓ Pevné sedadlo | ✓ Zádovný pás H=200 mm | ✓ Kola (pro model s měkkými koly) |
| ✓ Podnos | ✓ Síťová taška | ✓ Koš s černým krytem a magnetickým zámek (ne pro model HD) |
| ✓ Uzavřená taška se zipem | ✓ Červený zvonek | ✓ Držák kyslíkové láhve |
| ✓ LED světla bílá/červená | ✓ Sada kabelů pro jednoramennou brzdu | ✓ Zařízení pro snížení rychlosti |
| ✓ Držák kyslíkové láhve | ✓ Měkká kolečka | |
| ✓ Držák deštníku | | |



4. Technické údaje

Gepard rollator	Standard Art. 312401, 312403, 312404	Měkká kola Art. 312406, 312407, 312408	Malé Art. 312402	HD Art. 312405
Dostupné barvy	Černá, žlutá, fialová/černá		Černá	
Výška rukojetí (nastavitelná)	74 - 102 cm		66 - 86 cm	74 - 102 cm
Doporučené výšky uživatelů	150 - 200 cm		135 - 170 cm	150 - 200 cm
Výška sedadla	62 cm		55 cm	62 cm
Celková šířka v rozloženém / složeném stavu	60 / 22,5 cm			68 / 22,5 cm
Šířka mezi klikami	46 cm			56 cm
Délka	66 cm			
Hmotnost	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Maximální hmotnost uživatele / zatížení brašny	150 kg / 5 kg			200 kg / 5 kg
Brzdy	2 s parkovací funkcí			
Velikost kol (přední a zadní)	200 x 35 mm			

Product label

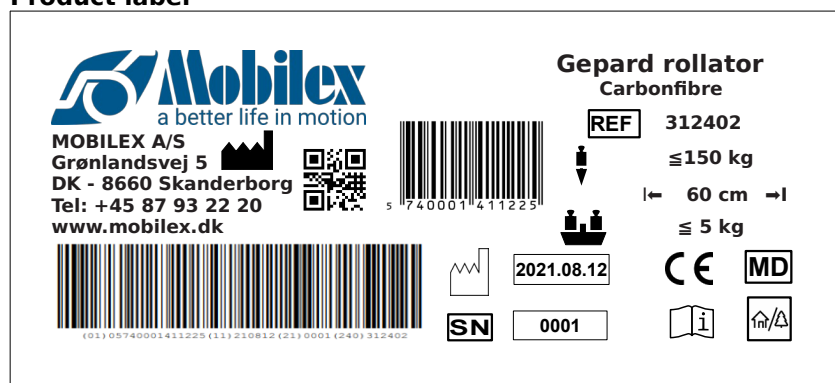

Příklad označení výrobku

	Odkaz na domovskou stránku pomocí QR-kódu		Výrobek s označením CE
	Výrobce		Datum výroby
	Dodržujte uživatelskou příručku		Maximální zatížení
	Sériové číslo.		Zdravotnické zařízení
	Číslo položky		Maximální šířka
	K použití v interiéru i exteriéru		Maximální zatížení koše

Význam ikon

5. Péče a údržba

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čisticími prostředky a houbou nebo měkkým hadrem. Zkontrolujte informace o konkrétním výrobku a používejte pouze komerční čisticí prostředky, které jsou vhodné k čištění. K dezinfekci používejte pouze dezinfekční prostředky certifikované pro použití se zdravotnickými prostředky, které jsou dostupné na místě.

Kola lze čistit horkou vodou s jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění je třeba ložiska kol pravidelně mazat olejem nebo když kola začnou vrzat.

Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Proto se doporučuje výrobek pravidelně kontrolovat odborným servisem. Doporučujeme následující postup:

- Čištění a dezinfekce výrobku
- Kontrola rámu, zda není ohnutý, poškozený, opotřebený nebo zkorodovaný.
- Kontrola opotřebitelných dílů a jejich případná výměna
- celkové dotažení součástí

Doporučená životnost: Obvykle 10 let, v závislosti na použití.

Úložiště: Doporučujeme skladovat na suchém místě při teplotách nad 0 °C.

Doprava

Pro přepravu se doporučuje zařízení složit. Zařízení by mělo být přepravováno stabilizovaným a zajištěným způsobem bez rizika náhlých nebo nebezpečných pohybů během přepravy.

Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Než výrobek převezme nový uživatel, musí být přístroj zkontrolován po technické stránce a vydezinfikován podle bodu 5.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Chodítko se obtížně vede nebo tlačí	Nečistoty mezi koly a vidlicemi	Odstranění nečistot nebo vlasů mezi koly a vidlicemi
Brzdy nefungují nebo fungují pouze na jedné straně.	Brzdové čelisti jsou opotřebené nebo brzdy nejsou správně seřizené.	Seřídte brzdy. V případě potřeby vyměňte brzdové čelisti (→ servisní středisko).
Sedadlo se při rozkládání chodítka nevejde do rámu.	Uzamykací zařízení je v nesprávné poloze nebo je vadné.	Zkontrolujte, zda je blokovací zařízení ve správné poloze. V případě potřeby jej vyměňte (→ servisní středisko).

7. Likvidace výrobku

Výrobek nelze likvidovat společně s domovním odpadem a je nutné jej odevzdat do místního recyklačního centra.

8. Záruční podmínky

Společnost Mobilex A/S poskytuje dvouletou záruku na škody způsobené chybami ve výrobě nebo chybami materiálu. Záruka se nevztahuje na neúmyslné opravy nebo používání výrobku. Na díly podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje, pokud opotřebení není způsobeno výrobní vadou. Pokud jsou na výrobku provedeny změny bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na výrobek nejsou platné. V případě poškození výrobku, na které se vztahuje tato záruka, informujte svého prodejce nebo přímo společnost Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu a nezahrnuje náhradu za zranění osob nebo nepoužívání výrobku během opravy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.

9. Prohlášení o shodě

Přístroj prošel posouzením shody podle nařízení EU: MDR 2017/745 týkající se zdravotnických prostředků a je označen CE. Pro tento prostředek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je k dispozici na adrese

mobilex.dk/medias/2021-11/ce_gepard_kulfiber_rollator_312401_04_05_06_8913.pdf

nebo prostřednictvím QR kódu vpravo.

