

GLOXI™

Speciální invalidní vozík



POZORNOST!

Výrobce odpovídá za správnou funkci zařízení pouze v případě, že je zakoupeno od kvalifikovaného pracovníka **Akces-MED Sp. z o.o.** nebo ve specializovaném lékařském obchodě.

Akces-MED Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět technické a obchodní změny obsahu návodu bez předchozího upozornění.




Zdravotnický prostředek třídy I v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. na zdravotnických prostředcích.

Výrobce vydal na výrobek příslušné prohlášení o shodě.



Akces-MED Sp. z o.o. má zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ISO 13485 v oblasti designu, výroby, prodeje a servisu.

Systém certifikován SGS.

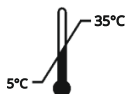

Obsah

Vstup.....	4
1. Účel návodu.....	5
2. Indikace a kontraindikace k použití přípravku.....	5
3. Obecná struktura produktu.....	7
4. Tabulka velikostí.....	8
5. Popis fungování produktu.....	9
5.1 Rozložení produktu.....	9
5.2 Sestavení produktu.....	10
5.3 Opěradlo s nastavitelným úhlem sklonu.....	12
5.4 Hloubkově nastavitelné sedadlo.....	13
5.5 Nastavitelná opěrka nohou.....	13
5.6 Nastavitelná rukojeť pro tlačení kočárku.....	15
5.7 Opěrka hlavy.....	15
5.8 5-bodový pás stabilizující trup.....	16
5.9 Nastavitelný stehenní klín.....	20
5.10 Bariéra.....	21
5.11 2-bodové stabilizační popruhy pro nohy.....	22
5.12 Centrální brzda.....	22
5.13 Kola.....	23
5.14 Dvoustupňový systém odpružení s tlumiči.....	25
6. Použití produktu.....	26
6.1 Příprava uživatele.....	26
6.2 Příprava produktu.....	26
6.3 Zaujmutí polohy vsedě.....	27
6.4 Návod k použití vest.....	28
7. Bezpečnostní pravidla.....	31
8. Záruční podmínky.....	33
9. Údržba a čištění.....	33
10. Označování.....	37

Vstup

Speciální invalidní vozík GLOXI™ je řešení navržené tak, aby poskytovalo pohodlí a podporu uživatelům s omezenou pohyblivostí. Kočárek lze přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele prostřednictvím řady nastavitelných prvků.

Hlavní vlastnosti kočárku GLOXI™:

- nastavitelný úhel opěradla - umožňuje změnit polohu sedu do polohy více vleže, což pomáhá odlehčit páteři snížením tlakových bodů,
- nastavitelná hloubka sedáku - poskytuje oporu stehem, stabilitu a pohodlí při dlouhém používání,
- opěrka hlavy - podpora hlavy a krku,
- 5-bodové stabilizační pásy trupu - zajišťují bezpečnost a stabilizaci trupu, snižují riziko posunu a pomáhají udržovat správné držení těla,
- mezistehenní klín - brání uživateli v pohybu v sedačce vpřed a podporuje správné postavení nohou,
- odolná a skládací konstrukce usnadňuje přepravu a manévrování uvnitř i venku.

Tento kočárek díky svým funkcím podporuje uživatele při každodenních činnostech, zajišťuje pohodlí a plnou funkčnost.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod. Obsahuje informace o produktu a pokyny, jak jej bezpečně a efektivně používat.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás:

Lékařský poradce: mobilní telefon +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mailem: produkcja@akces-med.com

POZORNOST!

Před použitím výrobku je uživatel povinen přečíst si tento návod k použití.

Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v této příručce vám umožní používat produkt bezpečně a správně a také prodlouží jeho životnost a estetiku.

1. Účel návodu

POZORNOST!

Tento návod obsahuje základní informace nutné pro správnou přípravu výrobku před použitím, použití výrobku, způsoby údržby a čištění.

Návod uchovávejte na snadno přístupném místě. Je určen pro osoby poskytující přímou péči osobám se zdravotním postižením a pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří výrobek obsluhují.

Před použitím výrobku je uživatel (nebo opatrovník) povinen přečíst si obsah tohoto návodu a dodržovat ustanovení v něm obsažená.

2. Indikace a kontraindikace k použití přípravku

Zdravotnický prostředek určený pro osoby s ortopedickým, neurologickým a kardiologickým onemocněním a osoby po operaci, s výraznými dysfunkcemi pohybového aparátu, které nezískali schopnost samostatného sedu nebo mají výrazné potíže se zaujetím a udržením polohy vsedě.

Jak pro velmi ochablé osoby se sníženým svalovým tonusem, tak pro osoby trpící spasticitou. Produkt může být také velmi užitečný pro lidi, kteří potřebují dlouhodobou úlevu jedné nebo obou dolních končetin. Výrobek je nenahraditelným pomocníkem v rehabilitačním procesu jak z hlediska pohybového, tak sociálního začlenění. Je ideální pro terapii a hru, stejně jako pro další každodenní aktivity, jako je učení nebo jídlo. Výběr vhodné velikosti produktu závisí na zdravotních indikacích a anatomických parametrech bez ohledu na věk uživatele.

Produkt se doporučuje lidem s diagnózou:

- dětská mozková obrna (DMO) - různé formy,
- poranění mozku a míchy různé etiologie s parézami končetin, těžkými poruchami rovnováhy a koordinace,
- pokročilá demyelinizační onemocnění (roztřesená skleróza - RS, amyotrofická laterální skleróza - ALS a další),
- myelomeningokéla,
- onemocnění svalů s parézou a paralýzou (dystrofie, myastenien, polymyositida). Genetické syndromy spojené s parézou dolních končetin,
- degenerativní a revmatická onemocnění kloubů,
- jiná onemocnění zahrnující parézu, paralýzu, poškození pohybového aparátu,
- po úrazech, kraniocerebrálních úrazech nebo úrazech páteře s poškozením míchy, s parézami a obrnami, zejména s kvadruparézou.

2. Indikace a kontraindikace k použití přípravku

Kontraindikace:

- kritický stav uživatele,
- ochrnutí,
- hluboké sedace,
- nestabilní zlomeniny se specifickými ortopedickými doporučeními, včetně zlomenin páteře,
- neléčená hluboká žilní trombóza,
- hemodynamická nestabilita,
- diagnostikovaná mozková dysfunkce při vzpřímeném sezení,
- těžká artritida krční páteře,
- plicní embolie,
- nedávný infarkt myokardu za posledních 24 hodin,
- čerstvé pooperační rány nebo nehojící se rány v oblasti zad, pánevního pletence, kyčelních kloubů a stehen,
- uživatelé s duševními poruchami by neměli být ponecháni v produktu bez dozoru opatrovníka.

3. Obecná struktura produktu



- A:
- OPĚRKA NA NOHY S PLYNULEM A BEZBODOVÝM NASTAVENÍM VÝŠKY A ÚHLU PLOŠINY,
 - 2-BODOVÉ STABILIZAČNÍ POPRUHY NA NOHY
 - DVOUSTUPŇOVÝ SYSTÉM BĚHU S TLUMICÍMI OBRAZY CITY/COMFORT

INFORMACE!

Příslušenství dostupné k tomuto produktu naleznete na webu akces-med.com v záložce produktu.

4. Tabulka velikostí



Symbol	Měření	Jednotka	Velikost 1
W	přibližná výška uživatele *	[cm]	100 - 140
A	šířka sedadla	[cm]	37
	šířka sedáku s bočními potahy **	[cm]	34
	šířka sedáku s bočními potahy a polštáři zužujícími sedák **	[cm]	28 (polštáře zúžení o 6 cm) 24 (polštáře zúžení o 10 cm)
L	hloubka sedu (s uvolněným pásem za opěradlem)	[cm]	26, 36 (28, 38)
L1	hloubka sedu na klín (s uvolněným pásem za opěradlem)	[cm]	10, 12 - 16, 18 (12, 14 - 18, 20)
C	výška opěradla	[cm]	65
	výška opěrky hlavy	[cm]	57, 62
	výška podpěr hrudníku **	[cm]	25 - 38
E	šířka opěradla	[cm]	33
	šířka mezi hrudními polštáři **	[cm]	17 - 25
F	délka opěrky nohou	[cm]	16 - 36
	úhel sklonu plošiny stupačky	[°]	-5 - 10
	délka platformy podnožky	[cm]	21
X	úhel sklonu opěradla vůči sedadlu	[°]	105 - 120
Y	úhel sklonu sedadla vzhledem k zemi	[°]	25
	max. hmotnost uživatele	[kg]	50

Rozměry a hmotnost zařízení	Jednotka	Velikost 1
šířka	[cm]	62
délka (horizontální rukojet)	[cm]	121
výška (horizontální rukojet)	[cm]	104
složená šířka (s kolečky)	[cm]	62
délka po složení (s kolečky)	[cm]	97
výška po složení (s kolečky)	[cm]	44
šířka po složení (kolečka sundaná ***)	[cm]	51
délka po složení (kolečka sundaná ***)	[cm]	97
výška po složení (kolečka sundaná ***)	[cm]	42
váha	[kg]	15

Poznámka: Tolerance rozměrů uvedených v tabulce je +/- 1 cm.

* Výška by neměla být základem pro výběr zařízení.

** Boční potahy sedadel, zužující sedáky, hrudní vycpávky nejsou standardní výbavou produktu.

***Demontovaná kola s nápravami.

5. Popis fungování produktu

5.1 Rozložení produktu



POZORNOST!

Před použitím kočárku se ujistěte, že byl rám správně rozložen (mechanismus skládání kočárku by se měl překrývat) - při rozložení uslyšíte charakteristické "KLIKNUŤÍ".

Ujistěte se prosím, že rám je zajištěn proti náhodnému složení a je správně vedený a neblokuje skládací mechanismus kočárku.

5. Popis fungování produktu

5.1 Rozložení produktu



POZORNOST!

Před použitím kočárku se ujistěte, že všechny prvky rámu a příslušenství kočárku jsou správně připevněny, kola jsou správně připevněna a brzda blokuje otáčející se kolo.

5.2 Sestavení produktu



INFORMACE!

Při skládání kočárku umožňuje nastavení opěradla do mezipolohy úhlu zachovat nejmenší rozměry po složení.

5. Popis fungování produktu

5.2 Sestavení produktu



5. Popis fungování produktu

5.2 Sestavení produktu



INFORMACE!

Při montáži výrobku můžete kola dodatečně demontovat. To vám umožní ušetřit další místo při skladování produktu nebo jeho přepravě v kufru auta.

Pokyny pro demontáž kola – viz část 5.13 Kola v tomto návodu.

5.3 Opěradlo s nastavitelným úhlem sklonu



POZORNOST!

Před použitím kočárku se ujistěte, že je zádová opěrka správně zajištěna a nemění svou polohu vlivem působící síly.

5. Popis fungování produktu

5.4 Hloubkově nastavitelné sedadlo



INFORMACE!

Další úpravy lze provést nastavením napětí popruhů zajišťujících 5-ti bodové stabilizační pásy trupu za opěradlem výrobku.



5.5 Nastavitelná opěrka nohou



INFORMACE!

Při změně délky podnožky si můžete upravit délku návleku na lýtka. Zvednutím spodní části ji složte a připevněte k druhému prvku.

Kryt lze i zcela demontovat - k rámu se přichytí lepicími páskami.

5. Popis fungování produktu

5.5 Nastavitelná opěrka nohou

NASTAVENÍ DÉLKY



NASTAVENÍ ÚHLU NEJLEPŠÍHO ÚHLU



i INFORMACE!

Seřízením dvou šroubů pod podnožkou upravíme její úhel sklonu.

i POTŘEBNÉ NÁSTROJE

imbusový klíč 4




5. Popis fungování produktu

5.6 Nastavitelná rukojeť pro tlačení kočárku



5.7 Opěrka hlavy

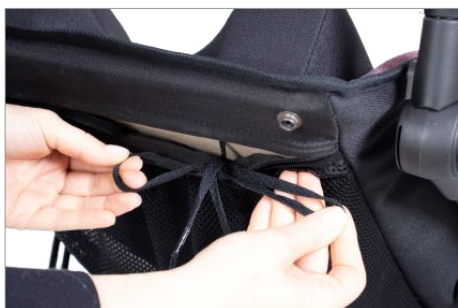

5. Popis fungování produktu

5.8 5-bodový pás stabilizující trup




INFORMACE!

Po vložení upevňovacích prvků do otvorů by měly být horní popruhy připevněny k tomu určenými maticemi za opěradlo kočárku. Chcete-li to provést, otevřete kapsu za opěradlem produktu.




INFORMACE!

Spodní uchycení 5-ti bodových pásů má dva konce - jeden z nich zakončený půlkruhem by měl být veden otvory v čalounění směrem k sedačce kočárku.

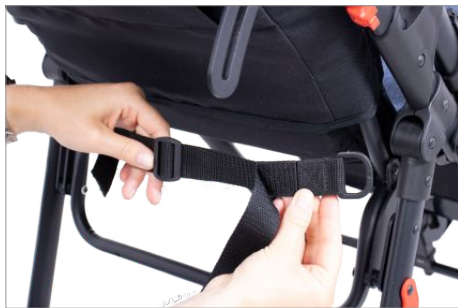


5. Popis fungování produktu

5.8 5-bodový pás stabilizující trup

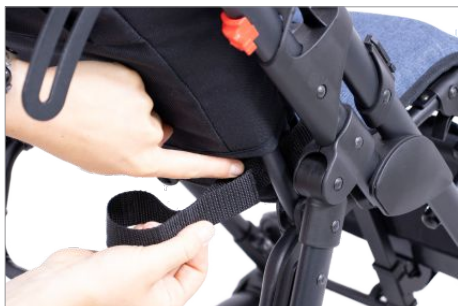


i INFORMACE!

Níže uvedený obrázek ukazuje, jak provléknout proužky přes seřizovací prvky.

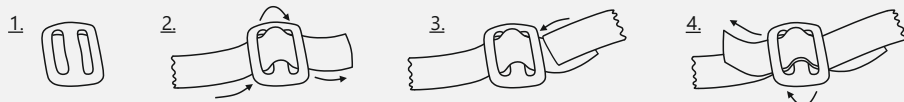

5. Popis fungování produktu

5.8 5-bodový pás stabilizující trup

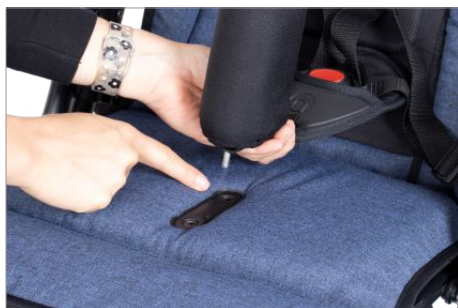

5. Popis fungování produktu

5.8 5-bodový pás stabilizující trup




INFORMACE!

Pokud se stehenní klín nepoužívá společně s pásy, připevněte jej pomocí šroubu, který je součástí sady, a utáhněte pod sedlem jako v případě stehenního klínu. Při utahování šroubu doporučujeme navíc použít imbusový klíč 4.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE

imbusový klíč 4

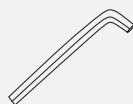

5. Popis fungování produktu

5.9 Nastavitelný stehenní klín

INFORMACE!

Mezistehenní klín se připevňuje podobně jako 5-ti bodové pásy. Klín by měl být vložen do jednoho z dvou otvorů na sedle produktu a utažen zespodu pomocí knoflíku.

Z důvodu běžného uchycení mezistehenního klínu a 5-ti bodových pásů je při použití jiného vybavení než 5-ti bodových pásů nutné je demontovat a klín znovu nasadit.

Kromě montáže na dvou místech lze klín také otáčet, čímž se hloubka sedáku ke klínu dodatečně zvětšuje nebo zmenšuje.



5. Popis fungování produktu

5.10 Bariéra



INFORMACE!


Zábranu lze na jedné straně odepnout.

POZORNOST!

Při instalaci zábrany dbejte na to, aby se pokožka a končetiny uživatele nedostaly do kontaktu s upevňovacími body.

5. Popis fungování produktu

5.11 2-bodové stabilizační popruhy pro nohy

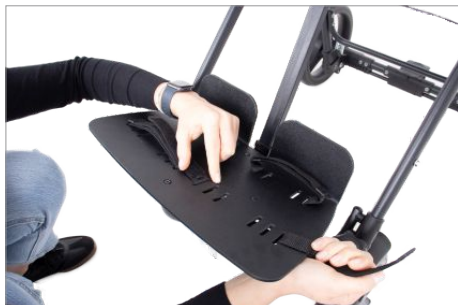

INFORMACE!

Popruhy lze instalovat do vybraných otvorů v podnožce, přičemž jejich šířku lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Popruhy by měly být protkány pod opěrkou nohou a připevněny nahoru, aby stabilizovaly nohy uživatele.

5.12 Centrální brzda



AKTIVNÍ BRZDA




BRZDA NEAKTIVNÍ


5. Popis fungování produktu

5.13 Kola

PŘEDNÍ KOLA ŘÍZENÍ S BLOKOVÁNÍM SMĚRU

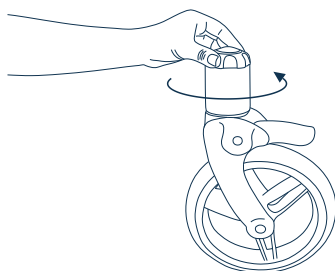

OTOČENÍ KNOFLÍKU
PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK -
MIMOVOLNÉ OTOČENÍ PŘEDNÍCH KOL

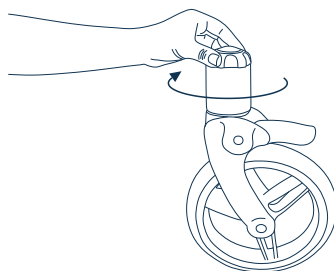

OTOČENÍ KNOFLÍKU
VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK -
ZABLOKOVÁNÍ OTOČENÍ PŘEDNÍCH KOL

INFORMACE!

Kolečka lze vyjmout - to je užitečné při skládání, abyste ušetřili ještě více místa při skladování produktu.



5. Popis fungování produktu

5.13 Kola

ZADNÍ KOLA

INFORMACE!

Zadní kola lze demontovat dvěma způsoby:

první umožňuje demontovat pouze kola, bez demontáže náprav,

druhý způsob umožňuje demontovat jak kola, tak nápravy - to je způsob, který umožňuje co nejvíce zmenšit šířku složeného produktu.

1 ZPŮSOB




2 ZPŮSOB



5. Popis fungování produktu


5.14 Dvoustupňový systém odpružení s tlumiči

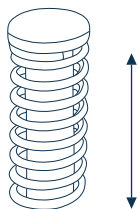

KOMFORTNÍ REŽIM

ZNAMENÁ ZVÝŠENOU DEPRESI

- PRO JÍZDU V NÁROČNÉM TERÉNU

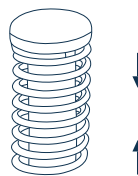

MĚSTSKÝ REŽIM

SNÍŽENÝ STUPEŇ ODPISU

- PRO JÍZDU NA ROVINNÉ SILNICI

6. Použití produktu

POZORNOST!

Před použitím produktu si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte informace v ní obsažené.

Před každým použitím připravte uživatele a zařízení.

6.1 Příprava uživatele

Před použitím produktu se ujistěte, že:

- oblečení uživatele bylo lehké a neomezovalo v pohybu,
- obuv byla pohodlná a dobře stabilizovala hlezenní klouby,
- uživatel nebyl umístěn do výrobku bez oděvu zakrývajícího tělo v místech kontaktu s čalouněním, z hygienických důvodů a zabránění oděru těla,
- v případě použití jakýchkoliv doplňkových pomůcek jako jsou kanyly, drény, sáčky, katétrů apod. byly dostatečně chráněny proti vypadnutí, vytažení nebo sevření, aby nepřekážely při používání výrobku,
- nasadit ortopedické pomůcky (krční límec, korzet, ortézy, ortopedickou obuv apod.), pokud je jejich použití indikováno.

POZORNOST!

Nasadit ortopedické pomůcky (krční límec, korzet, ortézy, ortopedickou obuv apod.), pokud je jejich použití indikováno.

O použití konkrétních ortopedických pomůcek rozhoduje ošetřující lékař nebo fyzioterapeut!

6.2 Příprava produktu

1. Chcete-li začít produkt správně používat, měli byste:

- rozbalit produkt,
- umístěte na rovný povrch bez svahů, umožňující snadný přístup k produktu, mimo zdroje ohně a vysoké teploty,
- ujistěte se, že všechny díly jsou funkční, správně namontované a stabilní,
- aktivovat brzdy,
- upravit produkt na rozměry uživatele,
- uvolněte stabilizační prvky, aby se uživatel mohl volně umístit ve výrobku,
- umístit uživatele do produktu,
- upevněte prvky používané ke stabilizaci uživatele,
- upravit nosné a polohovací prvky uživatele,
- nainstalujte příslušenství (pokud existuje).

6. Použití produktu

6.2 Příprava produktu

2. Pro uživatele s inkontinencí moči (inkontinence) by měly být použity hygienické vložky. Lze je zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách.

POZORNOST!

Před použitím výrobku se ujistěte, že všechny pásy, vesta a zajišťovací zařízení jsou správně nastaveny a upevněny a že jsou upevnění nastavitelných prvků pevně utažena.

Výrobek bude správně plnit svou funkci pouze tehdy, bude-li přizpůsoben tělesným rozměrům uživatele.

Hlavním pravidlem při montáži výrobku je poskytnout uživateli maximální pocit bezpečí. Nenuťte uživatele ke změně polohy těla – může to způsobit nepohodlí.

Nesprávné používání výrobku může vést k vytvoření nesprávných vzorců držení těla.

6.3 Zaujmutí polohy vsedě

Uživatel nejprve zaujme polohu vsedě obvykle v rehabilitačních, neurologických, neurochirurgických nebo ortopedických centrech. Je důležité správně sladit jednotlivé komponenty produktu se stavem uživatele s přihlédnutím ke stávajícím kontrakturám a deformacím. Výsadbu doma provádí kvalifikovaný personál po předchozím zaškolení (fyzioterapeut, komunitní sestra, vyškolení rodinní příslušníci) po přečtení návodu k produktu.

POZORNOST!

Nesprávná konfigurace zařízení může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, tělesné deformace, přetížení kloubů atd.

Pokud k nim dojde, okamžitě přestaňte používat, vyjměte uživatele z výrobku a lehněte si. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Pokud příznaky vymizely, měl by být o této skutečnosti informován ošetřující lékař, aby mohl rozhodnout o dalším průběhu rehabilitačního procesu.

O použití přípravku rozhoduje vždy ošetřující lékař.

Výrobek by měl uživateli nastavovat pouze osoby, které byly řádně proškoleny v jeho používání a přečetly si návod k obsluze.

6. Použití produktu

6.4 Návod k použití vest

POZORNOST!

Vesta poskytuje podporu držení těla osobám sedícím na speciálních invalidních vozících, sedačkách nebo jiných rehabilitačních sedačkách. Při správném použití umožňuje hrudní vesta udržet správnou polohu sedu po delší dobu. Vesta díky svému designu neomezuje volný pohyb horních končetin.

Pokud není vesta správně používána, může představovat vážné ohrožení zdraví a života uživatele!

Možné hrozby související s používáním vesty:

- 1) Pokud jsou spodní popruhy vesty zapnuty příliš volně, hrozí, že se vesta zvedne až ke krku uživatele a znesnadní mu dýchání – vždy kontrolujte napnutí popruhů a nastavte je tak, aby spodní okraj vesty se nacházel v blízkosti podbřišku uživatele.
- 2) Uživatel sklouzne ze sedačky, horní okraj vesty mu zakryje krk a zablokuje průdušnici, což ztěžuje dýchání – VŽDY používejte k vestě vybavení, jako je bederní pás nebo stehenní klín, abyste zabránili sklouznutí produktu.
- 3) Existuje riziko, že horní popruhy zajišťující vestu budou tláčit na krk uživatele a ztěžovat dýchání, pokud je uživatel nesprávně zajištěn ve výrobku - trup uživatele by pak měl být dodatečně stabilizován pomocí bočních podpěr. Pokud zařízení takové podpěry nemá a trup nelze správně stabilizovat, měl by být nahrazen zařízením s takovou funkcí.
- 4) Vesta je příliš přitažena k opěrce zad, v důsledku čehož uživatel nemůže volně dýchat - v takovém případě je nutné povolit pásy zajišťující vestu, aby ošetřovatel mohl volně zasunout ruku mezi vestu a tělo uživatele. Pokud však chceme uživatele správně stabilizovat, měli bychom použít dynamickou ortopedickou vestu, např. vestu Flex-Point®, která uživateli nebrání v dýchání.

Pokyny pro správné použití vesty:

- 1) Ujistěte se, že uživatel sedí v nejlepší možné poloze:
 - uprostřed sedadla,
 - hluboko v sedáku tak, aby sakrální páteř přiléhala k opěradlu.
- 2) Zajistěte pánev uživatele.
- 3) Ujistěte se, že boční podpěry zařízení, pokud jsou použity, jsou na správných místech. Použití bočních podpěr je povinné pro uživatele se špatným ovládním kufru. Tyto vycpávky omezují pohyby trupu na stranu, což může vést k tlačení popruhů vesty na krk.
- 4) Namontujte a upravte vestu:
 - upevněte a upravte spodní popruhy vesty tak, aby se spodní okraj vesty nacházel v blízkosti podbřišku uživatele. Spodní ramínka vesty nelze nechat příliš volná!
 - upevněte vodorovný popruh vesty (pokud je k dispozici),

6. Použití produktu

6.4 Návod k použití vest

- upevněte ramenní popruhy vesty,
 - zkontrolujte, zda se přezky vesty nerozepínají pod tlakem.
- 5) Zkontrolujte pozici uživatele:
- ujistěte se, že se vesta nemůže sama pohybovat až ke krku uživatele,
 - ujistěte se, že můžete vklouznout rukou mezi tělo nositele a vestu.

Abyste předešli zranění a minimalizovali riziko spojené s používáním vesty, dodržujte níže uvedená pravidla:

- 1) Poloha vesty MUSÍ být zkontrolována pokaždé, když uživatel sedí na sedadle.
- 2) Zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně uživatele před pádem dopředu, sklouznutím ze sedadla nebo zvednutím pánve. Vesta MUSÍ být vždy nošena se zajištěnou pávní uživatele (např. břišním pásem). Použití vesty nelze považovat samostatně, ale jako součást celkového systému podpory držení těla spolu s podporami, jako jsou bederní pásy, opěrky nohou, stabilizace trupu, stehenní abdukční pásy, poloha korbíčky a sklopná opěrka zad.
- 3) Zvláštní pozornost by měla být věnována zajištění stabilní podpory všech nohou uživatele. Pokud výrobek není vybaven podpěrou nohou, musí nohy uživatele spočívat pevně na zemi.
- 4) Pamatujte, že jakákoli změna úhlu opěradla, sedadla, opěrky nohou nebo nastavení funkce lopaty může ovlivnit účinnost pásů a podpěr!
- 5) Zvláštní pozornost je třeba věnovat použití stabilizačních prvků trupu nebo bočních podpěr. Pokud má uživatel špatné ovládání trupu, podpěry omezí boční pohyby, které by mohly vést k přitlačení popruhů vesty ke krku uživatele.
- 6) Vestu může uživateli sestavit a upravit pouze řádně proškolená osoba seznámená s návodem k používání vesty a pravidly jejího bezpečného používání.
- 7) Na vestě sami neprovádějte žádné opravy ani úpravy! Pro opravu nebo výměnu částí vesty kontaktujte jejího výrobce!
- 8) Poškozenou, zničenou nebo nekompletní vestu nepoužívejte, protože ohrožuje život a zdraví uživatele!
- 9) Nenechávejte uživatele v produktu bez dozoru!
- 10) Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému používání vesty v souladu s doporučeními pro děti, osoby s poruchami paměti nebo duševně nemocné osoby.
- 11) Ujistěte se prosím, že všechny osoby, které se o vás starají, byly obeznámeny s jeho bezpečným používáním.

6. Použití produktu

6.4 Návod k použití vest

Péče o vestu:

Vesta funguje efektivně pouze tehdy, je-li udržována v čistotě a udržována v souladu s doporučeními výrobce. Před každým použitím vesty zkontrolujte, zda:

- 1) Ramínka vesty nejsou roztřepená ani opotřebovaná. Pokud ano, nechte je vyměnit za nové.
- 2) Popruhy vesty nejsou připevněny ke kolům zařízení.
- 3) Spony nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, nechte je vyměnit za nové.
- 4) Zapínání na suchý zip pevně drží na svém místě. Pokud ne, odstraňte ze suchého zipu nečistoty nebo jej vyměňte za nový.
- 5) Od té doby, co byla vesta upravena tak, aby vyhovovala nositeli, nedošlo k žádným změnám z důvodu výšky, přibírání nebo úbytku hmotnosti.
- 6) Ramínka vesty by měla být upravena tak, aby nebyla příliš volná nebo příliš těsná.
- 7) Vestu pravidelně čistěte teplou mýdlovou vodou a osušte ji mimo přímé sluneční světlo a jiné zdroje tepla. Vesta musí být před opětovným použitím vždy suchá.

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně použití vesty, obraťte se na svého lékaře nebo fyzioterapeuta.

7. Bezpečnostní pravidla

POZORNOST!

GLOXI™ by měl být používán v souladu s doporučeními tohoto návodu. Před každým použitím připravte uživatele a zařízení.

Než se rozhodnete pro nákup speciálního invalidního vozíku GLOXI™, měli byste se se správným výběrem produktu poradit s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem. Před použitím si přečtěte všechny pokyny v přiloženém návodu.

1) Před každým použitím produktu byste měli:

- zkontrolovat výrobek, zda nevykazuje viditelné poškození nebo jiné vady, které mohou ohrozit uživatele při používání výrobku,
- ujistěte se, že všechny díly jsou správně nainstalovány a výrobek nevykazuje známky prasklin nebo deformací,
- zkontrolovat, zda nejsou uvolněné šrouby, matice a další závitové, lepené, šité atd. spoje,
- zkontrolovat stav čalounění, zda nejeví známky poškození,
- zkontrolovat účinnost brzd,
- zkontrolujte správnou funkci přezek,
- vždy používejte bezpečnostní pásy, pásy na suchý zip v těchto pásech se musí minimálně překrývat 8 cm,
- přizpůsobit výrobek rozměrům a potřebám uživatele vhodným umístěním nastavitelných prvků výrobku,
- ujistěte se, že pohyblivé části a knoflíky pro úpravu nastavení produktu jsou stabilní a zajištěné,
- chránit uživatele dostupnými stabilizačními prvky vybavení výrobku. Důvodem je mimo jiné ochrana uživatele: proti vypadnutí nebo vyklouznutí z přístroje,
- Pokud uživatel pociťuje nadměrné napětí v adduktorech dolních končetin, doporučuje se použít vybrané stehenní abdukční pásy, aby se zabránilo vzniku tlakových bodů a/nebo otlaků v oblasti kolenních kloubů na mediální straně.

2. Je zakázáno používat výrobek způsobem, pro který není určen.
3. Je zakázáno používat výrobek, pokud je poškozený nebo chybí jakákoliv část.
4. Je zakázáno ponechat uživatele ve výrobku bez péče a dohledu dospělé osoby.
5. Výrobek nepoužívejte, pokud v blízkosti není žádný pečovatel, který si přečetl návod k obsluze.
6. Je zakázáno nechávat výrobek u uživatele bez dozoru na svažitém nebo nerovném terénu.
7. Je zakázáno řídit produkt nahoru/dolů po schodech, ať už s uživatelem nebo bez něj.
8. Uživatel by měl vždy nastupovat a vystupovat z výrobku s aktivními brzdami.
9. Ujistěte se, že uživatel nestojí na stupačce při nastupování a vystupování z výrobku.

7. Bezpečnostní pravidla

10. Při používání výrobku dbejte na to, aby se končetiny uživatele nezachytily mezi nastavitelné prvky zařízení.
11. Výrobek by měl být skladován a používán mimo zdroje ohně nebo vysoké teploty. Výrobek by neměl být skladován a používán v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
12. Při přepravě výrobku bez uživatele by měl být dobře chráněn před možným poškozením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným zajištěním výrobku během přepravy.
13. Před použitím výrobku odstraňte všechny papírové a fóliové obaly.

POZORNOST!

Nesprávná konfigurace výrobku může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, tělesné deformace, přetížení kloubů atd. Pokud k nim dojde, okamžitě přestaňte výrobek používat, vyjměte uživatele ze zařízení a lehněte si. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo fyzioterapeuta. Při vymizení příznaků je třeba upozornit ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta, aby rozhodl o dalším průběhu rehabilitačního procesu.

Vážná nehoda týkající se prostředku musí být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel bydliště.

Je zakázáno přepravovat uživatele s výrobkem v dopravních prostředcích (např. auto, autobus, vlak).

Výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí spolknutí uživatelem.

Nepoužívejte výrobek, který vykazuje známky poškození, zničení nebo opotřebení. Pouze plně funkční výrobek, používaný v souladu s návodem k obsluze, je pro uživatele bezpečný. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Neměli byste se pokoušet sami opravovat produkt ani provádět žádné změny v jeho konstrukci, protože to uživatele vystavuje nebezpečí a ruší platnost záruky na produkt.

Nepřekračujte maximální povolenou hmotnost uživatele uvedenou na typovém štítku a v tabulce velikostí na straně 8 návodu.

8. Záruční podmínky

- Akces-MED Sp. z o.o. prodává technicky funkční výrobky, bez konstrukčních, montážních a materiálových vad atd.
- Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců, která se počítá od data zakoupení produktu uživatelem. Po tuto dobu výrobce garantuje opravy v rámci bezplatného servisu v souladu se záručním listem.
- Poškození, ke kterému dojde po 24 měsících, může být odstraněno na náklady uživatele, pokud produkt nepodléhá vrácení peněz. V takovém případě může uživatel požádat Národní zdravotní fond o vrácení peněz za opravu výrobku v rámci pozáručního servisu.
- Výrobce udává životnost výrobku na 48 měsíců. Po uplynutí této doby smí uživatel výrobek používat pouze v případě, že je vrácen výrobcí ke kontrole. Po kontrole výrobce opět určí dobu používání výrobku a termín další kontroly.
- V případě poškození výrobku kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili nebo zákaznický servis společnosti: Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).

9. Údržba a čištění

GLOXITM jako zdravotnický prostředek by měl být udržován v čistotě a měl by být používán v souladu s doporučeními výrobce. Zařízení by mělo být skladováno v čisté, suché a větrané místnosti. Údržba a čištění musí být prováděny minimálně jednou měsíčně. Pravidelné čištění a údržba produktu je nezbytná pro zachování jeho správné funkce a bezpečnosti.

Doporučení pro čištění čalounění a prvků produktu:

1. Omyjte vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku namočeného ve slabém, běžně dostupném čisticím prostředku.
2. Použití příliš vlhkého hadříku může zvýšit skvrny a poškodit čalounění nebo pěnu uvnitř.
3. Po vyčištění skvrn otřete čalounění čistým vlhkým hadříkem a poté osušte.
4. Nedovolte, aby se čalounění během čištění namočilo.
5. Čalounění by nemělo být promáčené.
6. Před dalším čištěním nezapomeňte z čalounění odstranit přebytečnou vlhkost.
7. Nedoporučuje se používat tvrdé kartáče.
8. Čalounění nečistěte silnými chemikáliemi, např. rozpouštědly nebo žíraviny na bázi chlóru.
9. Výrobek nesmí být čištěn, vyměňován nebo udržován, pokud jej uživatel používá.
10. Kovové a plastové prvky čistit ručně pomocí běžně dostupných čisticích prostředků na plasty po přečtení pokynů výrobce daného čisticího prostředku.

9. Údržba a čištění

11. Kovové, plastové, dřevěné a čalouněné prvky výrobku je možné dezinfikovat běžně dostupnou dezinfekční kapalinou. Pro dezinfekci vybraného prvku nastříkejte jeho povrch dezinfekčním prostředkem běžně dostupným na trhu a otřete jej suchým čistým hadříkem. Po dezinfekci počkejte, dokud prvek zcela nevyschne, zejména v případě čalounění. Při výběru dezinfekčního prostředku na bázi alkoholu nejprve na nenápadném místě zkontrolujte, zda přípravek nezbarví nebo nepoškodí dezinfikovaný povrch.

POZORNOST!

Před dalším použitím výrobku musí být čalounění vždy suché!

Za škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků výrobce Akces-MED Sp. z o.o. není odpovědný.

Před zahájením používání:

- očistit kola od všech nečistot,
- zkontrolovat, zda jsou kola správně namontovaná a nepoškozená, zda brzda blokuje rotující kola,
- zkontrolovat, zda struktura výrobku nevykazuje známky trhlin nebo jiných deformací,
- zkontrolovat, zda struktura výrobku nevykazuje známky trhlin nebo jiných deformací,
- zkontrolujte, zda popruhy stabilizačních prvků apod. nejsou roztřepené a zda přezky, suchý zip a přezky fungují správně.

POZORNOST!

Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo technické škody vzniklé řádným používáním výrobku. Pouze při dodržení těchto doporučení je výrobce odpovědný za správné fungování výrobku.

V případě jakéhokoli poškození se prosím obraťte na autorizovaného prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na oddělení zákaznických služeb Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).



9. Údržba a čištění

TECHNICKÁ RECENZE

Technické kontroly by měly být prováděny pravidelně. Před servisem výrobek důkladně očistěte, abyste odhalili všechna skrytá poškození.

FREKVENCE	CO BY SE MĚLO ZKONTROLOVAT?	CO BY SE MĚLO ZKONTROLOVAT?	KOMENTÁŘE
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM			
Celkový stav produktu.			
Zkontrolovat:			
- celý výrobek na viditelné poškození, praskliny a mechanické vady, - je produkt kompletní, - zda jsou všechny šrouby, šrouby, knoflíky, matice a další konstrukční prvky výrobku kompletní a dotažené.			
Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.			
Kola a brzdy.			
Zkontrolovat:			
- zvednutím základny, zda jsou kola správně připevněná a nepoškozená, - zda aktivní brzda blokuje rotující kolo, - zda nejsou špinavá kola. Očistěte kola od všech nečistot.			
Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.			
Upevnění konstrukčních prvků.			
Zkontrolujte všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivé části, zejména zkontrolujte:			
- správná instalace sedadla (pokud existuje), - správná montáž kola (pokud existuje), - správnou instalaci a provoz uživatelských bezpečnostních prvků (pokud jsou použitelné), - zda jsou všechny pohyblivé části kompletní, zda se zcela pohybují a nezasekávají se, - správné fungování nastavovacích mechanismů (pokud jsou) prvků, tj. opěrky hlavy, opěradla, sedadla, stehenního klínu, područek, opěrek nohou.			
Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.			
Čalounické prvky.			
Zkontrolovat:			
- prvky čalounění pro jakékoli poškození, trhliny, praskliny, uvolnění švy, deformace, - zda stabilizační popruhy, vesty a bezpečnostní pásy uživatele nejsou roztržené nebo zkroucené a zda přezky a přezky fungují správně, - zda jsou stabilizační popruhy, vesty a bezpečnostní pásy uživatele správně nainstalovány a zda se nerozepínají pod tlakem/tahem.			
Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.			
TÝDNĚ			
Čištění produktu.			
Strukturu a čalounění výrobku otřete od nečistot vzniklých každodenním používáním (prach, bláto apod.) vlhkým hadříkem s jemným, běžně dostupným čisticím prostředkem. Odstraňte nečistoty (např. vlasy, zbytky jídla atd.) z pohyblivých částí výrobku.			
Výrobek by měl být čistěn vždy, když je to nutné, nejméně však jednou týdně. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi chlóru nebo metylalkoholu. Před použitím výrobku musí být čalounění suché.			

9. Údržba a čištění

TECHNICKÁ RECENZE

Technické kontroly by měly být prováděny pravidelně. Před servisem výrobek důkladně očistěte, abyste odhalili všechna skrytá poškození.

FREKVENCE	CO BY SE MĚLO ZKONTROLOVAT?	CO BY SE MĚLO ZKONTROLOVAT?	KOMENTÁŘE
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

JEDNOU MĚSÍČNĚ

Osy kol, rychlospojky (pokud jsou k dispozici).

Zkontrolovat:

- zda se kola volně otáčejí na nápravách a zda na nápravách nejsou vůle. Údržba zahrnuje aplikaci malého množství konzervačního prostředku a maziva mezi nápravu a náboj kola. Zkontrolujte zapínání a vypínání kola.

Pokud najdete nečistoty, očistěte kola od zbytků jídla, prachu, vlasů nebo jiných zbytků.

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.

Spoje struktury výrobku (svařované, závitové, pájené).

Zkontrolovat:

- stav rámu výrobku v místech připojení (svary, závity, pájení).

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.

Pneumatiky, duše (pokud existují).

Zkontrolovat:

- stav opotřebení běhounu. Zkontrolujte viditelné poškození. Zkontrolujte hladinu tlaku v pneumatikách (pokud existuje).

Pokud zjistíte, že je tlak v pneumatikách příliš nízký, nahustěte je na vhodnou úroveň.

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.

JEDNOU ZA 6 MĚSÍCŮ

Pohyblivé konstrukční prvky.

Zkontrolovat:

- pohyblivé prvky konstrukce pro možné poškození a udržujte je pomocí vyhrazeného prostředku.

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.

Označení produktu.

Zkontrolovat:

- označení a etikety výrobku z hlediska jejich čitelnosti.

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, přestaňte produkt používat a kontaktujte Prodejce/distributora, u kterého byl produkt zakoupen, nebo Výrobce.

PO UKONČENÍ DOBY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

Podrobná recenze produktu.

Výrobce určuje dobu používání výrobku, která je uvedena v uživatelské příručce. Po uplynutí této doby smí uživatel výrobek používat pouze v případě, že je vrácen výrobcí ke kontrole. Po kontrole výrobce opět určí dobu používání kočárku a termín další kontroly.

V případě dotazů se obraťte na prodejce/distributora, od kterého jste produkt zakoupili, nebo na výrobce.

10. Označování



Certifikace posouzení shody výrobku se základními požadavky předpisů EU



Katalogové číslo



Sériové číslo



Před použitím si prosím přečtěte uživatelskou příručku



Pozornost!



Výrobce



Datum výroby



Výrobek neobsahuje latex



Skládujte na suchém místě



Je zakázáno používat výrobek bez zapnutých bezpečnostních pásů



Chraňte před slunečním zářením



Omezení skladovací teploty



Relativní skladovací vlhkost



Nesušte v sušičce



Sušte svisle



Nechlorovat



Nežehlit



Nečistěte chemicky



Nebělit



Buďte opatrní, jemný obsah



Je zakázáno sjíždět schody s uživatelem i bez něj



Je zakázáno ponechat uživatele při používání výrobku bez dozoru



Přečtěte si další informace



Stiskněte tlačítko uvedené na fotografii



Pro montáž je nutné použít nářadí uvedené v popisu



Lékařská složka

Ukázka jmenovky

QR KÓD
PO SKENOVÁNÍ JEDE NA
STRÁNKU VÝROBCE

ADRESA VÝROBCE

MAXIMUM POVOLENO
ZATĚŽENÍ PRODUKTU

SÉRIOVÉ ČÍSLO VE
FORMULÁŘI ČAROVÝ KÓD

JMÉNO VÝROBKU

JMÉNO VÝROBKU EN

ČAROVÝ KÓD

ZNAČENÍ
VZHLEDNOUT

DATUM VÝROBY

SÉRIOVÉ ČÍSLO

VÝROBCE



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619

Zplnomocněný zástupce