



MOPEDIA®

MA RI821_822_823_824_825_826_827_828 02 B_CS_04-2024

ZVEDÁKY MUEVO

NÁVOD

ČESKY

OBSAH

1. KÓDY	STR. 3
2. ÚVOD.....	STR. 3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STR. 3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	STR. 3
5. VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ.....	STR. 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR. 4
7. ROZMĚRY	STR. 5
7.1 Rozměry konstrukce s nosností 150 kg (RI821-RI822-RI823-RI824)	str. 5
7.2 Rozměry konstrukce s nosností 180/200 kg (RI825-RI826-RI827-RI828)...	str. 5
8. POPIS SOUČÁSTÍ.....	STR. 6
9. POPIS AKČNÍCH SAD	STR. 6
9.1 Hydraulický akční člen (150/180 kg).....	str. 6
9.2 Elektrická sada (150/200 kg).....	str. 6
10. POKYNY PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE ZVEDÁKŮ (PRO VŠECHNY MODELÝ)...	STR. 6
11. POKYNY PRO MONTÁŽ AKČNÍCH ČLENŮ	STR. 7
11.1 Montáž hydraulického akčního členu (platná pro RI821-RI823-RI825-RI827)	str. 7
11.2 Montáž elektrického akčního členu (platná pro RI822-RI824-RI826-RI828)	str. 8
12. POKYNY PRO POUŽITÍ.....	STR. 9
12.1 Pokyny pro použití hydraulických modelů RI821-RI823-RI825-RI827.....	str. 9
12.2 Pokyny pro použití elektrických modelů RI822-RI824-RI826-RI828.....	str. 9
13. VAROVÁNÍ	STR. 11
14. ČIŠTĚNÍ	STR. 11
15. ÚDRŽBA	STR. 11
16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	STR. 12
17. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR. 12
17.1 Varování pro správnou likvidaci výrobku ve smyslu evropské směrnice 2012/19/EU.....	str. 12
17.2 Zacházení s použitými akumulátory (směrnice 2006/66/ES)	str. 12
18. ZÁRUKA	STR. 12
18.1 Záruka na nabíjecí akumulátory	str. 13
18.2 Opravy.....	str. 13
18.3 Náhradní díly	str. 13
18.4 Klausule zbavení odpovědnosti	str. 13

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
z 5. dubna 2017 ohledně zdravotnických prostředků

1. KÓDY

HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY

- RI821** - HYDRAULICKÝ akční člen s nosností 150 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím pedálu
RI823 - HYDRAULICKÝ akční člen s nosností 150 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím páky
RI825 - HYDRAULICKÝ akční člen s nosností 180 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím pedálu
RI827 - HYDRAULICKÝ akční člen s nosností 180 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím páky

ELEKTRICKÉ ZVEDÁKY

- RI822** - ELEKTRICKÝ akční člen s nosností 150 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím pedálu
RI824 - ELEKTRICKÝ akční člen s nosností 150 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím páky
RI826 - ELEKTRICKÝ akční člen s nosností 200 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím pedálu
RI828 - ELEKTRICKÝ akční člen s nosností 200 kg, s otevíráním nohou prostřednictvím páky

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli zvedák řady **MUEVO by MOPEDIA** od firmy MORETTI S.p.A. Design těchto zvedáků a jejich kvalita zaručují maximální pohodlí, bezpečnost a spolehlivost. Zvedáky **MUEVO by MOPEDIA** od firmy MORETTI S.p.A. byly navrženy a vyrobeny tak, aby naplňovaly vaše potřeby praktického a správného použití. Tento návod k použití obsahuje drobná doporučení pro správné použití vámi zvolené pomůcky a užitečné rady pro vaši bezpečnost. Doporučuje se, abyste si pozorně přečetli celý tento návod ještě před použitím zvedáku. V případě pochybností se prosím obraťte na prodejce, který vám bude umět správně pomoci a poradit.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Zvedáky řady **MUEVO by MOPEDIA** jsou určeny pro zvedání a přesun osob s pohybovými potížemi prostřednictvím pomoci doprovodu, který aktivuje ovládací prvky. Nemohou být používány jednou osobou. Firma MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím prostředku nebo použitím odlišným od vymezení v tomto návodu.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma MORETTI SpA prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že výrobky vyrobené a uvedené na trh samotnou firmou MORETTI SpA, patří do skupiny výrobků ZVEDÁKY MOPEDIA, jsou ve shodě s aplikovatelnými ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH z 5. dubna 2017. Pro tento účel firma MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou vlastní odpovědnost následující:

1. Předmětné prostředky vyhovují základní bezpečnostním a výkonnostním požadavkům v souladu s přílohou I nařízení 2017/745, jak je nařízeno přílohou IV tohoto nařízení.
2. Předmětné prostředky NEJSOU MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI.
3. Předmětné prostředky NEJSOU URČENY PRO KLINICKÝ VÝZKUM.
4. S předmětnými prostředky se bude obchodovat v NESTERILNÍM balení.
5. Předmětné prostředky je třeba považovat za náležící do třídy I ve shodě s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Firma MORETTI SpA uchovává a poskytuje k nahlédnutí kompetentním orgánům po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže technickou dokumentaci potvrzující shodu s nařízením 2017/745.

Poznámka: Kompletní kódy výrobku, kód registrace výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a případné odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které firma MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ!

Věnujte velkou pozornost přítomnosti pohybujících se součástí, které by mohly způsobit uvážnutí končetin a ublížení na zdraví osob.

- Pro správné použití prostředku vycházejte z tohoto návodu a před každým použitím věnujte mimořádnou pozornost části Údržba a varování.
- Pro správné použití prostředku se poraďte s vaším lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli zdroje tepla, protože obal je tvořen kartonem.
- Životnost příslušenství je určena opotřebením částí, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Vždy věnujte pozornost přítomnosti dětí.
- Nepřekračujte maximální dovolenou nosnost.
- Uživatel a/nebo pacient bude muset oznámit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, ve kterém žije pacient.

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód výrobku



Jednoznačná identifikace prostředku



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Ohledně pokynů si přečtěte návod



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Upozornění:



Datum výroby



Likvidace výrobku podle směrnice ES/19/2012





Ochrana před prachem a stříkající vodou



Aplikovaná část typu B



7. ROZMĚRY

7.1 Rozměry konstrukce s nosností 150 kg (RI821-RI822-RI823-RI824)

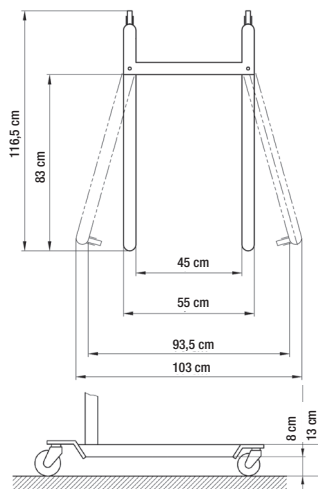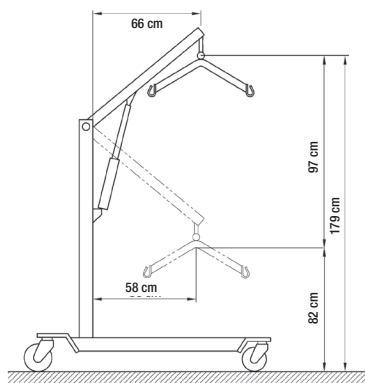


- Hmotnost zvedáku s malou konstrukcí a elektrickou výbavou: **35 kg**
- Hmotnost zvedáku s malou konstrukcí a hydraulickou výbavou: **33 kg**

7.2 Rozměry konstrukce s nosností 180/200 kg (RI825-RI826-RI827-RI828)

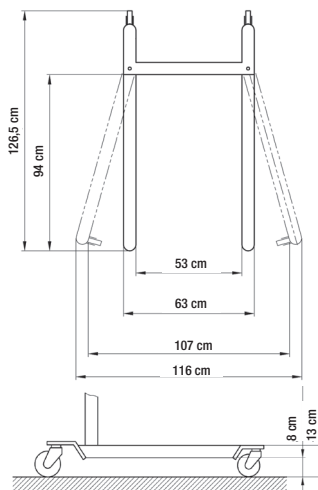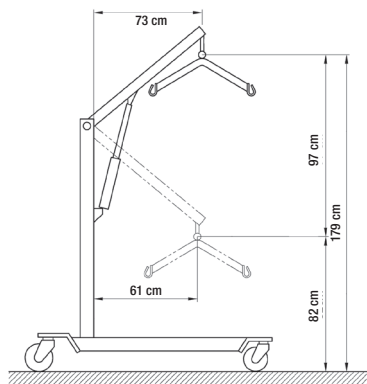

- Hmotnost zvedáku s velkou konstrukcí a elektrickou výbavou: **37 kg**
- Hmotnost zvedáku s velkou konstrukcí a hydraulickou výbavou: **35 kg**

8. POPIS SOUČÁSTÍ

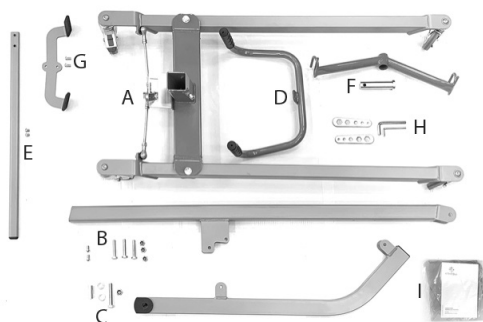

- A - 1 ks základny s kolečky
- B - 1 ks sloupu
- C - 1 ks ramena
- D - 1 ks rukojeti
- E - 1 ks páky
(pouze pro RI823-RI824-RI827-RI828)
- F - 1 ks rozporky s úchyty pro popruh
(pouze pro RI821-RI822-RI825-RI826)
- G - 1 ks pedálu
- H - příslušenství pro montáž
- I - 1 ks standardního popruhu

(Obrázky pro ilustrační účely)

9. POPIS AKČNÍCH SAD


9.1 Hydraulický akční člen (150/180 kg)

Platný pro modely RI821-RI823-RI825-RI827)



9.2 Elektrická sada (150/200 kg)


Platný pro modely RI822-RI824-RI826-RI828

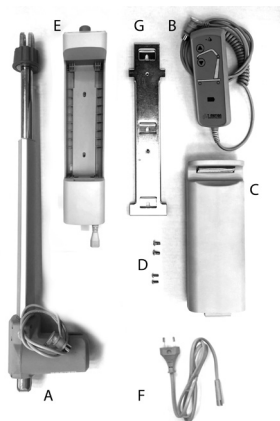

- A - 1 ks akčního členu TiMOTION
- B - 1 ks dálkového ovládání TiMOTION
- C - 1 ks akumulátoru TiMOTION
- D - 4 ks upevňovacích šroubů řídicí jednotky
- E - 1 ks řídicí jednotky TiMOTION
- F - 1 ks kabelu nabíječky akumulátorů
- G - 1 ks držáku řídicí jednotky


10. POKYNY PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE ZVEDÁKŮ (PRO VŠECHNY MODELÝ)

1. Odšroubujte šroub v základně sloupu. (obr. 4)
2. Zasuňte sloup do určené dutiny v základně. (obr. 4)
3. Vložte šroub, který zajišťuje sloup, do základny a řádně jej zašroubujte. (obr. 4)
4. Vložte pouzdro dovnitř otvoru ramene, určeného pro vložení kloubového spoje sloupu (obr. 5a)
4. Připojte rameno ke sloupu prostřednictvím šroubů z výbavy. (obr. 5b)
5. Umístěte rukojeť na sloup a připevněte ji prostřednictvím 2 šroubů. (obr. 6)

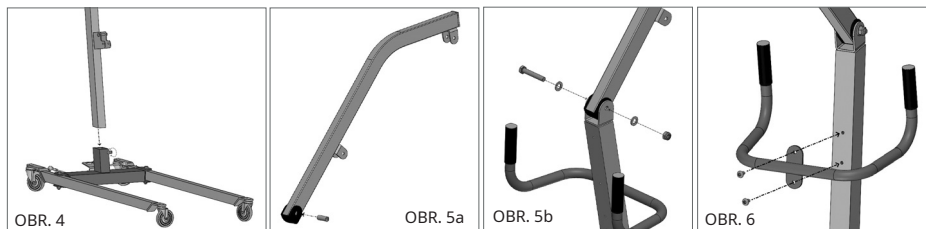

(Obrázky pro ilustrační účely)

6. Umístěte rozporku do příslušného háku, který se nachází na koncové části zvedacího ramene. (obr. 7)
- 7a. Vložte páku do otvoru v základně a zajistěte ji svými šrouby. (obr. 8a – pro modely RI823-RI824-RI827-RI828)
- 7a. Vložte pedál do otvoru v základně a zajistěte jej svými šrouby. (obr. 8b – pro modely RI821-RI822-RI825-RI826)
8. Až bude konstrukce úplně sestavena, nainstalujte hydraulický/elektrický akční člen týkající se vybraného typu zvedání.

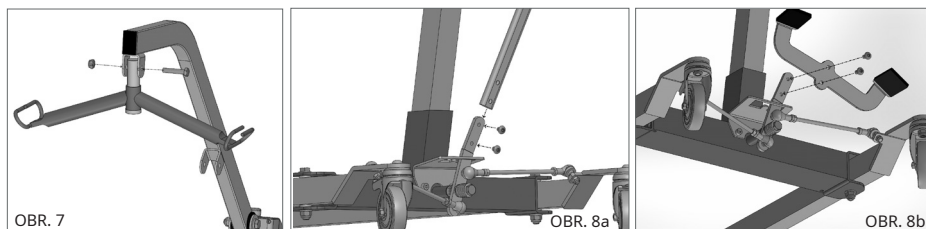

(Obrázky pro ilustrační účely)

11. POKYNY PRO MONTÁŽ AKČNÍCH ČLENŮ


11.1 Montáž hydraulického akčního členu (platná pro RI821-RI823-RI825-RI827)




(Obrázky pro ilustrační účely)

1. Umístěte hydraulický akční člen podle obrázku a řádně jej zajistěte ve vrchní a spodní části prostřednictvím šroubů a pojistných matic. (obr. 9)


11.2 Montáž elektrického akčního členu (platná pro RI822-RI824-RI826-RI828)

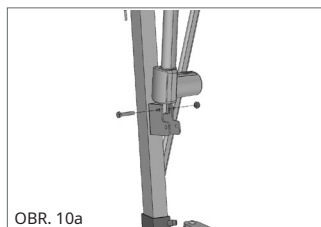

OBR. 10a

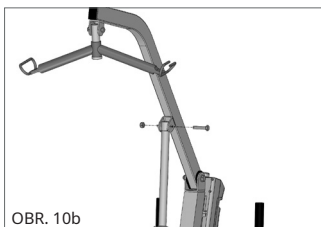

OBR. 10b

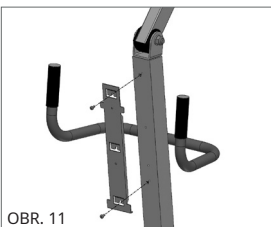


OBR. 11

(Obrázky pro ilustrační účely)

1. Odšroubujte dva svorníky na ramenu a na sloupu pro připevnění akčního členu. Vložte akční člen a zajistěte jej dvěma předtím odšroubovanými šrouby. (obr. 10a-10b)
2. Připevněte nosnou konzolu řídící jednotky k sloupu prostřednictvím šroubů z výbavy, s použitím určených otvorů. (obr. 11)
3. Vložte řídící jednotku na právě namontovanou konzolu jejím posouváním shora dolů a zajistěte ji šrouby. (obr. 12a-12b)
4. Vložte akumulátor do řídící jednotky. (obr. 13a-13b)
5. Připojte konektor akčního členu do středového kanálu řídící jednotky a dálkové ovládání na pravý kanál. (obr. 14). Elektrická sada je úplně namontována a připravena k použití (obr. 15)



OBR. 12a

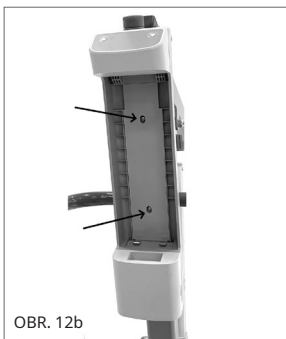


OBR. 12b



OBR. 13a



OBR. 13b

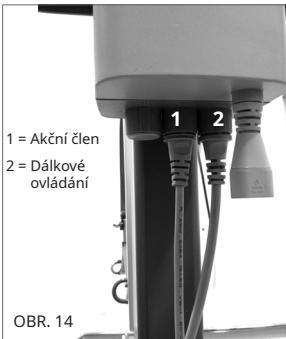

OBR. 14

1 = Akční člen
2 = Dálkové ovládání



OBR. 15

(Obrázky pro ilustrační účely)

Poznámka: před použitím pečlivě ověřte, zda není stisknuto tlačítko nouzového zastavení, a kdyby bylo aktivováno, uvolněte jej kvůli zapnutí řídící jednotky.

12. POKYNY PRO POUŽITÍ

12.1 Pokyny pro použití hydraulických modelů RI821-RI823-RI825-RI827

1. Před zvedáním roztáhněte nohy základny až na maximální možný rozsah:
 - mírně potáhněte nohou pedál otevírání směrem k sobě, a poté jej pootočte doleva a zajistěte jej v poloze otevření (pro RI821-RI825)
 - mírně potáhněte páku otevírání směrem k sobě, a poté ji pootočte doleva a zajistěte v poloze otevírání (pro RI823-RI827) (Provedte stejné úkony v opačném směru pro vrácení základny do stavu zavření)
2. Zajistěte brzdy zadních kol
3. Udržujte pacienta vystředěného vůči nohám základny a vždy obráceného směrem k doprovodu
4. Pečlivě uchyťte pásy popruhu k rozporce.
5. Ujistěte se, že ventil na hydraulickém čerpadle je úplně zavřený (za tímto účelem jej otočte ve směru „CLOSE“)
6. Pro zahájení zvedání aktivujte čerpací páku hydraulického akčního členu
7. VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA BĚHEM CELÉHO ROZSAHU POHYBU!
8. Zvedněte pacienta do potřebné výšky a ponechte jej v poloze čelně vůči doprovodu
9. Odjistěte zadní kola a přesuňte pacienta
10. Před zahájením sestupu pacienta znovu zajistěte zadní kola
11. Zahajte sestup pacienta mírným pootočením ventilu na hydraulickém čerpadle ve směru „OPEN“

POZN. Pro provedení pomalého sestupu mírně otevřete ventil, zatímco pro zvýšení rychlosti jej pootočte více ve stejném směru „OPEN“

12. VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA BĚHEM CELÉHO ROZSAHU POHYBU!

BĚHEM SESTUPU VŽDY POMÁHEJTE PACIENTOVI PŘI KONTROLE SPRÁVNÉ POLOHY SEDU!

UPOZORNĚNÍ!

Během sestupu zabraňte střetu pacienta s překážkou, která by mohla zabránit jeho pohybu dolů. V takovém případě znovu zvedněte pacienta a odstraňte příčinu zabraňující sestupu.

12.2 Pokyny pro použití elektrických modelů RI822-RI824-RI826-RI828



UPOZORNĚNÍ!

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZVEDÁKU NEMOCNÝCH SE DOPORUČUJE NECHAT NABÍJET AKUMULÁTORY PO DOBU CCA 6–8 HODIN. POTÉ SE PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM UJISTĚTE, ŽE AKUMULÁTOR JE NABITÝ.

1. Před zvedáním roztáhněte nohy základny až na maximální možný rozsah:
 - mírně potáhněte nohou pedál otevírání směrem k sobě, a poté jej pootočte doleva a zajistěte jej v poloze otevření (pro RI822-RI826)
 - mírně potáhněte páku otevírání směrem k sobě, a poté ji pootočte doleva a zajistěte v poloze otevírání (pro RI824-RI828) (Provedte stejné úkony v opačném směru pro vrácení základny do stavu zavření)
2. Zajistěte zadní kola
3. Udržujte pacienta vystředěného vůči nohám základny a vždy obráceného směrem k doprovodu
4. Pečlivě uchyťte pásy popruhu k rozporce.
5. Pro zvedání pacienta použijte tlačítko se šipkou nahoru
6. VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA BĚHEM CELÉHO ROZSAHU POHYBU!
7. Zvedněte pacienta do potřebné výšky a ponechte jej v poloze čelně vůči doprovodu
8. Odjistěte zadní kola a přesuňte pacienta
9. Před zahájením sestupu pacienta znovu zajistěte zadní kola
10. Pro spouštění pacienta použijte tlačítko se šipkou dolů
11. VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA BĚHEM CELÉHO ROZSAHU POHYBU!

BĚHEM SESTUPU VŽDY POMÁHEJTE PACIENTOVI PŘI KONTROLE SPRÁVNÉ POLOHY SEDU!

UPOZORNĚNÍ!

Během sestupu zabraňte střetu pacienta s překážkou, která by mohla zabránit jeho pohybu dolů. V takovém případě znovu zvedněte pacienta a odstraňte příčinu zabráňující sestupu.

AUTOMATICKÁ FUNKCE ZABRÁNĚNÍ PŘITLAČENÍ

Součástí elektrické sady je automatická funkce pro zabránění přitlačení pacienta, která blokuje sestup zvedacího ramena v případě náhodného styku pacienta s překážkou.



NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

Na řídicí jednotce se nachází červené tlačítko „STOP“, jehož stisknutí okamžitě deaktivuje všechny ovládací příkazy. Pro obnovení činnosti pootočte červenou kolovou rukojeť, dokud nedojde k jejímu uvolnění a vystoupení nahoru, do klidové polohy.

OVLÁDACÍ PRVKY NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

Na řídicí jednotce se nacházejí dva tlačítka (jedno se šipkou nahoru a druhé se šipkou dolů), která lze použít namísto ovládacích prvků na dálkovém ovládání pro provedení úkonů

v případě, že samotné dálkové ovládání vykazuje problémy činnosti.

MECHANICKÉ SPUŠTĚNÍ AKČNÍHO ČLENU

V případě použití manuálního/mechanického spouštění se ujistěte, že bude provedeno ve stavu zcela bezpečném pro pacienta. Pro aktivaci manuálního/mechanického spouštění dolů potáhněte směrem dolů červený kroužek, který se nachází v horní části akčního členu, a pootočte jím proti směru hodinových ručiček. Po ukončení spouštění vraťte červený kroužek do klidové polohy

INDIKACE STAVU NABÍTÍ AKUMULÁTORU

Součástí je indikátor s 3 LED pro signalizaci stavu nabití akumulátoru. Tento indikátor se nachází na dálkovém ovládání. Tři rozsvícené LED informují o dokončení nabíjení akumulátoru, zatím co jedna rozsvícená LED informuje, že akumulátor je vybitý a třeba jej nabít. Nový standardní akumulátor, který je plně nabitý, s externí teplotou použití a skladování 20 °C, se vyznačuje výdrží více než 40 cyklů se zatížením 200 kg; snížení zvedaného zatížení odpovídá zvýšené výdrži akumulátoru a tedy většímu počtu proveditelných cyklů.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ



- Připojte kabel pro nabíjení akumulátoru do zásuvky elektrické sítě a poté do určeného vstupu řídicí jednotky.
- Na dálkovém ovládání se nachází indikátor nabití akumulátoru, který během nabíjení bliká; po rozsvícení všech tří LED nepřerušovaným světlem je akumulátor zcela nabitý.
- Před zahájením používání zvedáku nezapomeňte vždy odpojit kabel nabíjení akumulátorů!
- Před použitím prostředku nabíjejte akumulátory nejméně po dobu 6 hodin.



UPOZORNĚNÍ!

Během úkonů nabíjení:

- Červené tlačítko nouzového zastavení ve tvaru hříbu „STOP“ na vrchní části řídicí jednotky nesmí být stisknuto. Za tímto účelem pootočte a povytáhněte k sobě tlačítko ve tvaru hříbu, protože stisknutí neumožňuje nabíjení akumulátoru.
- Systém z bezpečnostních důvodů neumožňuje žádný pohyb akčního členu a tedy zvedacího ramena.

POKYNY PRO POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání je připojeno k řídicí jednotce prostřednictvím roztahovacího spirálového kabelu.



Tlačítka na dálkovém ovládání:

1. tlačítko ‚nahoru‘ pro zvedání
2. tlačítko ‚dolů‘ pro spouštění

Signalizace na dálkovém ovládání:

3. LED pro indikaci přetížení nadměrnou hmotností: zvedák obsahuje zařízení pro kontrolu přetížení, které přeruší pohyb při překročení mezní hodnoty nadměrného zatížení a aktivuje příslušný vizuální i akustický signál.
4. LED pro signalizaci stavu nabití akumulátoru

13. VAROVÁNÍ

- Zvedák je zařízení, které umožňuje provádět krátké přesuny pacienta s potížemi pohybu, jako například z lůžka do invalidního vozíku nebo pohodlné židle a opačně. Zvedák se nesmí používat pro přepravu pacienta.
- Během zvedání nemocného se ujistěte, že nohy základny jsou co nejvíce otevřené, že ovládací páka je zajištěna bezpečným způsobem v příslušné poloze a že brzdy zadních kol jsou zajištěny.
- Během přesunu nepřekonávejte překážky, které by mohly způsobit převrácení.
- Použití zvedáků nemocných, popsaných v tomto návodu, spolu s popruhy Moretti, které jsou součástí příslušenství, umožňuje odebírat a zvedat pacienty ze země.



UPOZORNĚNÍ!

Vždy ověřte dobrý stav popruhů. Nepoužívejte popruhy, na kterých se vyskytují stopy po poškození nebo opotřebením.

14. ČISTĚNÍ

Pro čištění popruhů a konstrukce používejte roztok alkoholu a neutrálního mýdla ve stejném poměru, rozmíchaných s vodou.

15. ÚDRŽBA

Je mimořádně důležité, aby byl zvedák před každým použitím zkontrolován:

- Zejména prosím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky řádně utaženy
- Zda je zvedák schopen volného pohybu s neaktivními brzdami kol

- Pro správnou činnost ověřte brzdy zadních kol
- Je velmi důležité pravidelně ověřovat správné uspořádání spojovacích čepů a příslušných kroužků dorazu (čepy spojují akční člen v horní a dolní poloze zvedáku s rozporkou v místě připojení popruhu). Mechanické části je třeba mazat kapkou oleje kvůli usnadnění posuvu a odolnosti vůči opotřebení. Pozornost věnujte zejména mechanickému zařízení pro roztahování nohou zvedáku nemocných. Při mazání postupujte v souladu s výše uvedenými informacemi každé dva nebo tři měsíce.

16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohledně náhradních dílů a příslušenství vždy vycházejte z katalogu Master firmy Moretti.

Příslušenství

Kód RP828 nosítková konstrukce pro zvedák nemocných (max. nosnost 150 kg)

Kód BLC250 Váha pro zvedák nemocných třídy III

Kód RP881 Standardní popruh s opěrkou hlavy „basic“

Kód IM100-IM101 Standardní popruh bez opěrky hlavy

Kód IM110-IM111 Standardní popruh s opěrkou hlavy

Kód IM120 Přidržovací popruh s tyčemi

Kód IM140 Popruh pro toaletu bez opěrky hlavy

Kód IM141 Popruh pro toaletu s opěrkou hlavy

Kód IM150 Přidržovací popruh pro amputované

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ODMÍTÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA NEHODY ZPŮSOBENÉ NEVHODNÝM POUŽITÍM.

17. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace prostředku nikdy nepoužívejte běžné systémy pro odevzdávání pevného komunálního odpadu. Doporučuje se však prostředek zlikvidovat prostřednictvím komunálních sběrných dvorů za účelem určených úkonů recyklace použitých materiálů.

17.1 Varování pro správnou likvidaci výrobku ve smyslu evropské směrnice 2012/19/EU

Na konci své životnosti nesmí být výrobek zlikvidován spolu s komunálním odpadem. Může být doručen do příslušných sběrných středisek pro separovaný sběr, spravovaných obecními správami, nebo prodejcem, kteří poskytují tuto službu. Zlikvidovat výrobek odděleně umožňuje vyhnout se možným negativním následkům na životním prostředí a na zdraví, vyplývajícím z jeho nevhodné likvidace, a umožňuje provést rekuperaci materiálů, ze kterých je tvořen, kvůli výrazné úspoře energie a zdrojů. Pro zdůraznění povinnosti zlikvidovat elektrické zdravotnické přístroje je na výrobku uvedena značka přeškrtnuté mobilní nádoby na odpad.

17.2 Zacházení s použitými akumulátory (směrnice 2006/66/ES)

Symbol na výrobku informuje, že akumulátory nesmí být považovány za běžný domovní odpad. Ujistěte se o správné likvidaci akumulátorů přispěje k zabránění negativním následkům pro životní prostředí a pro zdraví, které by jinak mohly být zapříčiněné jejich nevhodnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá uchovávat přírodní zdroje. Použité akumulátory odevzdejte do sběrných středisek za účelem jejich recyklace. Ohledně podrobnějších informací o likvidaci použitých akumulátorů nebo výrobku se můžete obrátit na obecní správu, místní službu likvidace odpadu nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

18. ZÁRUKA

Na všechny výrobky firmy Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výjimkou případných níže uvedených vyloučení a omezení. Tato záruka není platná v případě nevhodného použití, zneužití nebo změny výrobku a kvůli chybějícímu dodržení pokynů pro použití. Správné určené použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Firma Moretti není odpovědná za vzniklé škody, ublížení na zdraví osob nebo cokoli jiného způsobeného nebo souvisejícího s instalací a/nebo použitím zařízení, které není důsledně ve shodě s pokyny uvedenými v návodech pro instalaci, montáž a použití. Firma Moretti neručí za výrobky Moretti z hlediska škody nebo vad při následujících stavech: přírodní katastrofy, neautorizované

úkony údržby nebo opravy, škody vyplývající z problémů elektrického napájení (když je součástí), použití dílů nebo komponentů, které nebyly dodány firmou Moretti, nedodržení základních pokynů pro použití, neautorizované změny, škody na zásilce (odlišné od originální zásilky od firmy Moretti) nebo chybějící provedení údržby uvedené v návodu. Záruka se nevztahuje na komponenty podléhající opotřebení, když byla škoda přiřazena běžnému použití výrobku.

18.1 Záruka na nabíjecí akumulátory

Na originální a náhradní akumulátory se vztahuje záruka 90 (devadesáti) dnů z hlediska výkonu a 6 (šesti) měsíců z hlediska výrobních vad, nebo podle zákonných požadavků. Když úplně nabité akumulátory zůstanou nepoužité déle než tři následné měsíce, záruka bude automaticky zrušena. Když úplně vybité akumulátory zůstanou nepoužité déle než tři následné dny, záruka bude automaticky zrušena.

18.2 Opravy

V případě, že výrobek od firmy Moretti vykazuje vady materiálu nebo výroby během záručního období, firma Moretti vyhodnotí se zákazníkem, zda je vada výrobku kryta zárukou. Firma Moretti může na základě vlastního nenapadnutelného rozhodnutí, vyměnit nebo opravit artikel v záruce u uvedeného prodejce výrobků značky Moretti nebo ve svém sídle. Náklady na pracovní sílu vztahující se na opravy výrobku může nést firma Moretti, jestliže se určí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Oprava nebo výměna nepředstavuje prodloužení záručního období. Výrobek v záruce může být vrácen za účelem opravy pouze poté, co dostal předběžnou autorizaci od zákaznického servisu firmy Moretti. Náklady na pracovní sílu a odeslání vztahující se na opravu nekrytou zárukou budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Opravy výrobků, které nejsou kryty zárukou, jsou zaručeny po dobu 6 (šesti) měsíců, počínaje dnem přijetí opraveného výrobku. Zákazníkovi bude oznámeno, zda po obhlídce a odzkoušení přijatého výrobku firma Moretti dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník uhradí náklady na jeho vrácení.

18.3 Náhradní díly

Na originální náhradní díly od firmy Moretti se vztahuje záruka 6 (šesti) měsíců od dne přijetí náhradního dílu.

18.4 Klauzule zbavení odpovědnosti

S výjimkou případu, kdy je to specificky uvedeno v této záruce, a v zákonem stanoveném rozsahu, firma Moretti nenabízí žádné prohlášení, záruku nebo podmínku, vyjádřenou nebo implicitní, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro speciální účel, neporušení a nezasahování. Firma Moretti neručí za to, že použití výrobku Moretti bude probíhat nepřetržitě nebo bez chyb. Doba trvání případných implicitních záruk, které by mohly být nařízeny zákonem, je omezena na záruční období, v zákonem stanoveném rozsahu. Některé státy neumožňují omezení trvání implicitní záruky nebo vyloučení ani omezení náhodných nebo přímých škod ve vztahu k výrobkům pro spotřebitele. V těchto státech nebo zemích nemusí být některá vyloučení nebo omezení této záruky aplikována na uživatele. Tato záruka podléhá změnám bez předešlého upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Výrobek _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Ulice _____ Lokalita _____

Prodané (komu) _____

Ulice _____ Lokalita _____

ČESKY

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo), tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**VYROBENO V ITÁLII**

POZNÁMKY

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

tel. +39 055 96 21 11
fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com